

BARRIER® Universalset ISCC




Hållbara
förbättringar



- Förstärkning med slanghållare
- Vätsketätt material
- Absorberande toppskikt
- Hållbara förbättringar
- ISCC-certifierade operationslakan stödjer produktion av hållbara material
- Transport- och avdelningsförpackningarna är tillverkade av cellulosamaterial från FSC™-certifierade källor

Draperingsguide

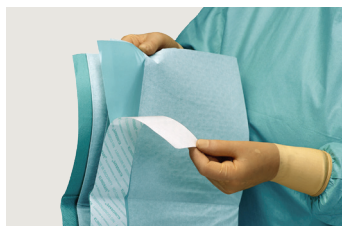


1. Ta bort skyddspappret från den häftande op-handduken.



2. Fäst de häftande op-handdukarna utmed patientens sidor, börja vid axlarna. Följ kroppens konturer, håll materialet något sträckt.



3. Håll det häftande op-lakanet (medium) i vikningen. Ta bort den mittersta delen av skyddspappret.

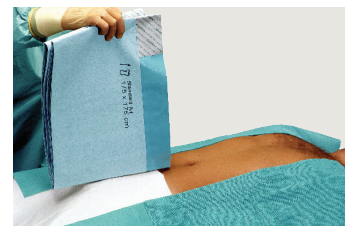

4. Placera det vikta häftande op-lakanet över mittdelen av buken.



5. Ta bort resterande skyddspapper och fäst kanterna.



6. Vik ut op-lakanet över patientens ben.



7. Placera det häftande op-lakanet (large) över patientens bröstorg. Ta bort resterande skyddspapper och fäst kanterna.



8. Vik ut op-lakanet över narkosbågen och fixera sug och diatermi.



60054 Universal Set Standard: Avdelningsförpackning 6 st / Transportkartong 12 st

Förpackningarna är märkta med FSC™ Mix. FSC™ Mix-etiketten innebär att träet i förpackningen kommer från FSC™-certifierade skogar, återvunnet material eller kontrollerat virke. Återvinningssymbolen innebär att våra kartonger kan återvinnas och deras fibrer kan användas igen.

Beskrivning	Storlek (cm)	Målvärde för cellulosa-innehåll* i komponenten (absorptionslagret)	Andelen material i komponent som har massbalans approach** (vätsketäta lagret)
1 x Assistansbordspåse	79 x 145	7%	0%
2 x Häftande op-handduk	90 x 75	24%	41%
4 x Cellduk	18 x 25	100%	0%
1 x OP-tejp	9 x 49	0%	0%
1 x Häftande op-lakan	175 x 175	24%	50%
1 x Häftande op-lakan	150 x 240	24%	49%
1 x Instrumentbordslakan	150 x 190	12%	0%

*Lakanet innehåller biobaserade träcellulosafibrer

**Produkten är tillverkad med riktade x% av råmaterial från ISCC-certifierade källor

Läs mer på www.molnlycke.se

Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, Gamlestadsvägen 3 C, 402 52 Göteborg. Telefon 031 722 30 00
Varumärkena, namn och logotyper Mölnlycke och BARRIER registreras globalt till ett eller flera av
Mölnlycke Health Care-koncernen. © 2020 Mölnlycke Health Care AB. Alla rättigheter förbehållna.
FSC är ett varumärke som tillhör The Forest Stewardship Council A.C.