

Melgisorb® Ag

Högabsorberande antimikrobiellt alginatförband

- Effektiv absorption till kraftigt vätskande kaviteter och ytliga sår
- Ger en ihållande antimikrobiell effekt
- Hög fiberstyrka möjliggör avlägsning av produkten i ett stycke

Alginat som innehåller silver


- Ger en ihållande antimikrobiell effekt
- In vitro tester visar en antimikrobiell effekt från 4 timmar upp till 21 dagar

Alginat med CMC fibrer


- Lämpar sig till kraftigt vätskande sår
- Utformad för ytliga och djupa sår
- Möjliggör avlägsning i ett stycke




Så här används Melgisorb Ag

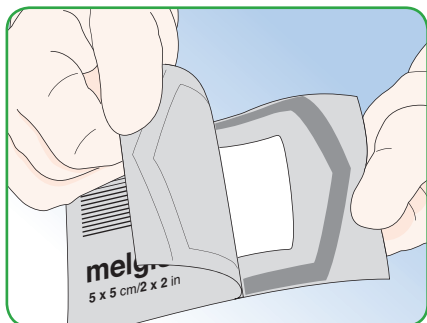

Debridera och skölj såret och den omkringliggande huden enligt gällande kliniska rengöringsrutiner. Välj en storlek av Melgisorb Ag som är något större än såret. Klipp eller vik förbandet, så att det passar såret.

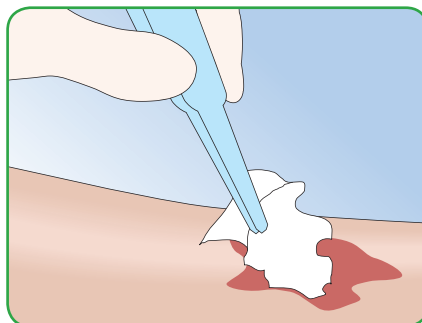

Fyll djupa sårhål löst, och se till att förbandet inte överlappar sårkanterna. Applicera direkt på sårytan.

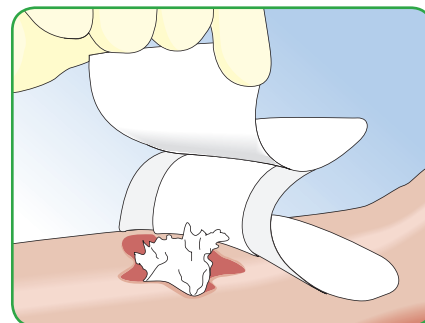

Täck och sätt fast Melgisorb Ag med ett ytterförband.

Användningsområden

Melgisorb Ag kan användas till behandling av måttligt till kraftigt vätskande sår, till exempel:

- Postoperativa kirurgiska sår
- Traumatiska sår
- Bensår
- Trycksår
- Diabetiska sår
- Transplantat- och tagställen
- Delhudsbrännskador

Observera

Melgisorb Ag kan ligga kvar på såret i upp till 7 dagar, förbandsbyte skall utföras beroende på sårets tillstånd. I början av behandlingen kan det därför vara nödvändigt att byta förband varje 24:e timme. Om såret verkar torrt, fukta förbandet med vanlig koksaltlösning innan och avlägsna därefter förbandet försiktigt ifrån såret. Rengör sedan sårområdet enligt gällande kliniska rengöringsrutiner innan applicering av nytt förband.

Melgisorb Ag sortiment

(levereras sterila, enstycksförpackade)

Art nr	Storlek cm	Avd fp	Transp fp
256050	5 x 5	10	100
256100	10 x 10	10	100
256150	15 x 15	10	100
256200	20 x 30	10	50
256600	3 x 44	10	100

Kontraindikationer

Melgisorb Ag skall inte användas:

- På individer som är känsliga eller allergiska mot alginater eller silver
- Vid kirurgisk implantation
- För att kontrollera kraftig blödning
- För applicering på torra sår, eller på lågt vätskande sår

Försiktighetsåtgärder

- Förbandet kan fastna om det används på torra sår, eller på sår som endast vätskar lite. Om förbandet fastnar och det är svårt att avlägsna, kan förbandet fuktas med vanlig koksaltlösning innan avlägsning.
- Förbandets egenskaper kan bli nedsatta vid användning av vaselinbaserad salva.
- Undvik kontakt med elektroder eller ledande geler vid elektronisk mätning, t.ex. electrocardiogram (ECG) och elektroencefalografi (EEG).
- Använd inte förbandet under strålbehandling, ultraljud eller magnetröntgen.
- Vid händelse av en klinisk infektion, ersätter inte silverförband behovet av systemterapi eller liknande be

Find out more at www.molnlycke.se

Mölnlycke Health Care AB

Box 130 80

402 52 Göteborg

Telefon: 031-722 30 00

www.molnlycke.se

Namnet Mölnlycke Health Care och dess logotype, samt Melgisorb® är registrerade varumärken hos Mölnlycke Health Care AB.

