

Mestopore® S

Absorberande förband för kontinent stomi med mjuk silikon

Absorptionsdyna

- Superabsorberande polyakrylat för extra säkerhet
- Inget fibersläpp
- Lågvidhäftande

Nonwovenfilm


- Vätsketät
- Ångpermeabel

Safetac® teknologi

Safetac är en patenterad vidhäftningsteknologi som är skonsam vid förbandsbyte och minskar vävnadsskada i såret och på den omkringliggande huden. Detta minskar smärtan hos patienten.

Safetac® -yta

- Minskar smärta och vävnadsskada vid förbandsbyte

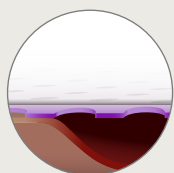


- Minskar smärta och vävnadsskada vid förbandsbyte
- Skonsam mot huden
- Enkel att använda


Mestopore® S


Mölnlycke®


Så här används Mestopore® S

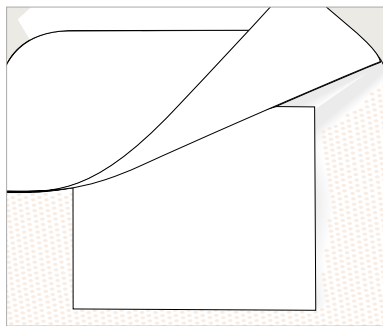

Ta bort skyddspappret från övre halvan av Mestopore S.

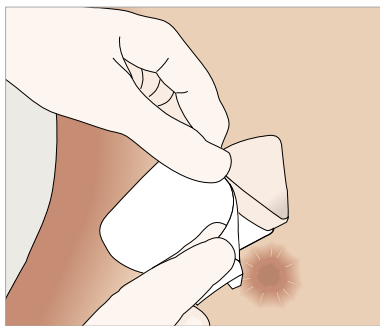

Applicera förbandet försiktigt mot huden över stomin. Ta bort det nedre skyddspappret och sätt fast resten av förbandet.

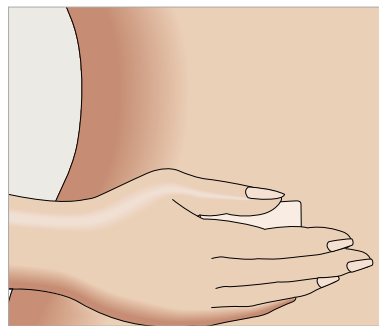

För att ta bort förbandet – lyft försiktigt från sida till sida (inte uppifrån och ner).

Så här fungerar Mestopore S

Mestopore S är ett självhäftande förband för kontinent stomi. En icke-vidhäftande kontaktyta skyddar stomivävnaden från skada. Sekret från stomin absorberas av högabsorberande fibrer. Den självhäftande kanten förhindrar läckage och är mycket skonsam mot huden, även vid upprepade förbandsbyten.

Fördelar med Mestopore S

- Minskar smärta och vävnadsskada vid förbandsbyte
- Hudvänlig häfta
- Skonsam
- Följsam
- Duschbar
- Lämnar inga rester
- Enkel att använda

Användningsområden

Mestopore S är speciellt utvecklad för att användas vid kontinent stomi.

Observera

Vid kliniska tecken på infektion rådgör med vårdpersonal för lämplig infektionsbehandling.

Safetac® teknologi

Safetac är en patenterad vidhäftningsteknologi som finns exklusivt på förband från Mölnlycke Health care.

Safetac teknologi:

- Sluter sig kring sårkanterna och motverkar läckage.
- Skonsam emot såret och den omkringliggande huden vid förbandsbyte.
- Fäster inte på den fuktiga sårytan, men fäster skonsamt på den omkringliggande torra huden.

Förband med Safetac minskar vävnadsskada i såret och på den omkringliggande huden. Detta minskar smärtan hos patienten.^{1,2,3}

Mestopore S levereras steril, enstycksförpackade

Art.nr.	Apotekets varunr	Storlek cm	Storlek sårdyna	Ant/frp
665100	201167	9 × 10	5 × 5,5 cm	160
665100	201427	9 × 10	5 × 5,5 cm	20



Referenser: **1.** Gotschall CS, et al. Prospektive, Randomised study on the Efficacy of Mepitel® on Children with Partial Thickness Scalds. *Journal of Burns Care & Rehabilitation*. 1998;19:279-83. **2.** Dahlström K K. *Scand J Plast Reconstr Hand Surg* 1995;29:325-27. **3.** Dykes P. The link between the peel force of adhesive dressings and subjective discomfort in volunteer subject. *Journal of Wound Care*, 2003;12, no 7.

Mer information på www.molnlycke.se

Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, 402 52 Göteborg, Telefon 031-722 30 00
The Mölnlycke Health Care name and logo, Safetac and Mestopore S are registered trademarks of Mölnlycke Health Care AB.



Mölnlycke®