



Riisumisopas

Likaisen leikkaustakin ja käsineiden riisuminen

- Pidä käsineet käsissäsi ja tartu leikkaustakkiin vyötäröltä.
- Vedä takki pois päin kehostasi katkaistaksesi kiinnitysnauhat.
- Riisuessasi leikkaustakkia kääri takki nurinpäin mytäksi. Kosketa käsineillä vain takin ulkopintaa.
- Poista käsineet takin riisumisen yhteydessä. Kosketa paljailla käsillä vain käsineiden ja takin sisäpintaa.
- Hävitä käsineet ja leikkaustakki sekä desinfioi kätesi.

Jos et saa käsineitä riisuttua leikkaustakin poistamisen yhteydessä, hävitä leikkaustakki ja poista käsineet kohtien F ja G kuvaamalla tavalla. Lopuksi desinfioi kätesi.

- Poista ensimmäinen käsine. Kosketa toisen käden käsineellä vain poistettavan käsineen ulkopintaa ja vedä käsine kädestäsi.
- Poista viimeinen käsine. Ota paljaalla kädellä kiinni käsineen ranteen sisäpuolelta ja vedä käsine kädestäsi. Desinfioi kätesi.

Huom.

Jos käyttäjä ei pysty katkaisemaan leikkaustakin kiinnitysnauhvoja ja avustavaa hoitajaa ei ole saatavilla, käsineet tulee poistaa ennen takin riisumista. Lisäksi kädet tulee desinfioida käsineiden poiston ja leikkaustakin riisumisen välissä. Leikkaustakki riisutaan koskettamalla vain takin ulkopintaa. Lopuksi kädet tulee desinfioida uudelleen.



Based on: AORN Guidelines for Perioperative Practice, 2019. Guideline for Transmission Based Precautions. pgs 1098-1104. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) recommended sequences for donning and doffing of PPE. <https://www.cdc.gov/hai/pdfs/ppe/ppe-sequence.pdf>

Lue lisää www.molnlycke.fi

Mölnlycke Health Care Oy, Valimotie 21, 00380 Helsinki. Puhelin 0201 622 300.
Mölnlycke Health Care- ja Bioigel®-tavaramerkit, nimet ja logotyypit on kansainvälisesti rekisteröityjä vähintään yhdelle Mölnlycke Health Care -yhtiölle. ©2020. Mölnlycke Health Care AB. Kaikki oikeudet pidätetään. FISU1262006


Mölnlycke®