



Riisumisopas

Likaisen suojatakin ja tutkimuskäsineiden riisuminen

- Pidä käsineet käsissäsi ja tartu suojatakkiin vyötäröltä.
- Vedä takki pois päin kehostasi katkaistaksesi kiinnitysnauhat.
- Vedä suojatakin kaulus ja hihat eteenpäin ja ulos käsineistä koskettamalla käsineillä vain takin ulkopintaa. Riisuessasi takkia kääri takki nurinpäin myytyksi.
- Poista käsineet takin riisumisen yhteydessä. Kosketa paljailla käsillä vain käsineiden ja takin sisäpintaa.
- Hävitä käsineet ja suojatakki sekä desinfioi kätesi.

Jos et saa käsineitä riisuttua suojatakin poistamisen yhteydessä, hävitä takki ja poista käsineet kohtien F ja G kuvaamalla tavalla. Lopuksi desinfioi kätesi.

- Poista ensimmäinen käsine. Kosketa toisen käden käsineellä vain poistettavan käsineen ulkopintaa ja vedä käsine kädestäsi.
- Poista viimeinen käsine. Ota paljaalla kädellä kiinni käsineen ranteen sisäpuolelta ja vedä käsine kädestäsi. Desinfioi kätesi.

Huom.

Jos käyttäjä ei pysty katkaisemaan suojatakin kiinnitysnauhuja ja avustavaa hoitajaa ei ole saatavilla, käsineet tulee poistaa ennen takin riisumista. Lisäksi kädet tulee desinfioida käsineiden poiston ja suojatakin riisumisen välissä. Suojatakki riisutaan koskettamalla vain takin ulkopintaa. Lopuksi kädet tulee desinfioida uudelleen.



Based on: AORN Guidelines for Perioperative Practice, 2019. Guideline for Transmission Based Precautions. pgs 1098-1104. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) recommended sequences for donning and doffing of PPE. <https://www.cdc.gov/hai/pdfs/ppe/ppe-sequence.pdf>

Lue lisää www.molnlycke.fi

Mölnlycke Health Care Oy, Valimotie 21, 00380 Helsinki. Puhelin 0201 622 300.
Mölnlycke Health Care- ja Biogel®-tavaramerkit, nimet ja logotyypit on kansainvälisesti rekisteröityjä vähintään yhdelle Mölnlycke Health Care -yhtiölle. ©2020. Mölnlycke Health Care AB. Kaikki oikeudet pidätetään. FISU1342008


Mölnlycke®