

Su profesional sanitario ha elegido Mepilex® Border Post-Op para tratar su herida quirúrgica.




Cambie el apósito sólo cuando sea necesario.

El apósito está diseñado para permanecer en la herida el máximo tiempo posible. Recuerde que su apósito ha sido aplicado en un ambiente estéril. Cada vez que cambia o levanta el apósito para ver la herida, corre el riesgo de exponer la incisión a la contaminación y aumentar el riesgo de infección.

¡Si ve sangre en el apósito, no se preocupe! Mepilex® Border Post-Op está diseñado para absorber eficazmente grandes cantidades de sangre.

¡No es necesario cambiar!

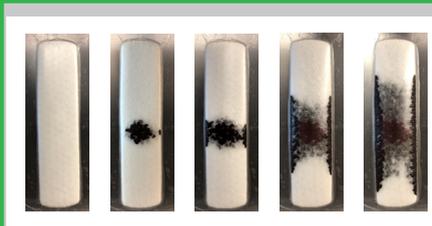

¡Cambie el apósito!



- **En algunas ocasiones**, la incisión sangra, saturando el apósito. Si esto sucede, ¡contacte con su cuidado o profesional sanitario para obtener asesoramiento!
- **Puede ducharse** con el apósito ya que es impermeable. Evite pasar con la ducha directamente sobre el apósito. No se bañe ni vaya a nadar.
- **Al vestirse**, tenga cuidado para no arrancar el apósito.
- **No produce** dolor en su retirada. El apósito está diseñado para minimizar el dolor en la retirada. No se necesita ninguna técnica específica, simplemente tire de una esquina y retírelo.
- **Cuando la herida esté cerrada y la cicatriz recién formada, utilice Mepiform®.** Mepiform es una lámina fina y discreta de silicona que puede ser utilizada como terapia profiláctica en heridas cerradas y para prevenir la formación de cicatrices hipertróficas o queloides.



Más información en www.molnlycke.es

Mölnlycke Health Care, Av. de la Vega 15, Edif. 3 - 3ª Planta - 28108 Alcobendas. Tel: 914841320. Mölnlycke, Mepilex y Mepiform son marcas y logotipos registrados globalmente por una o más empresas del grupo Mölnlycke Health Care. © 2021 Mölnlycke Health Care AB. Todos los derechos reservados.


Mölnlycke®