


Guide för förbandsbyte vid egenvård

Din sjuksköterska har valt förbandet Mepilex® för ditt sår


Så här använder du Mepilex®:

1. Tvätta händerna noggrant med tvål och varmt vatten i 20 sekunder.
2. Rengör såret enligt din sjuksköterskas anvisningar och torka omkringliggande hud noggrant.
3. Förbandet ska överlappa den torra omkringliggande huden. Om sjuksköterskan rekommenderar det ska du klippa till förbandet så att det passar sårets form och placering.


4. Avlägsna den första skyddsfilmen.

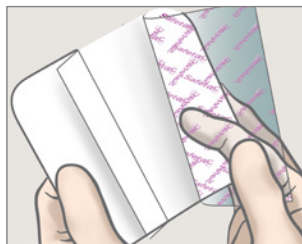

5. Applicera med häftsidan mot såret. Ta sedan bort den återstående skyddsfilmen och jämna ut förbandet mot huden. Sträck inte förbandet.

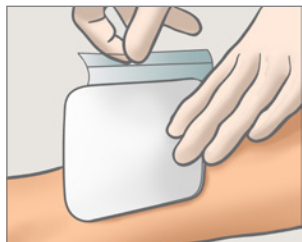

6. Fixera Mepilex med t.ex. ett lämpligt bandage eller tejp enligt din sjuksköterskas rekommendation.

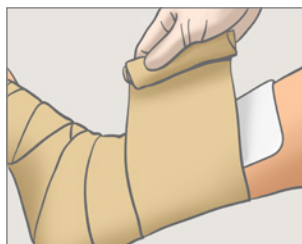

När ska förbandet bytas?

Din sjuksköterska råder dig att byta förbandet när:

För mer vägledning och information, kontakta din sjuksköterska:

Glöm inte:

- ✓ Mepilex-förbandet är avsett för engångsbruk och ska inte återanvändas.

Mepilex bör hanteras och appliceras av vårdpersonal, men om ingen utbildad vårdpersonal är tillgänglig kan du själv eller en familjemedlem sköta förbandsbytet. Om andra personer än utbildad vårdpersonal sköter förbandsbytet tar tillverkaren inget ansvar för hur appliceringen av förbandet utförs, eller konsekvenser därav. Om Mepilex appliceras av någon annan än en utbildad vårdpersonal sker det helt på användarens eget ansvar.

Läs mer på www.molnlycke.se

Molnlycke Health Care AB, P.O. Box 13080, Gamlestadsvägen 3 C, SE-402 52 Göteborg. Tel.: + 46 31 722 30 00. Varumärkena, namnen och logotyperna Molnlycke och Mepilex är globalt registrerade av ett eller flera företag i Molnlycke Health Care Group. ©2020 Molnlycke Health Care AB. Med ensamrätt. HQIM001710


Molnlycke®