

Mepore®

Selbstklebender, absorbierender Wundverband

Schutzfolie

- Einfach zu entfernen

Weiches, elastisches Vlies

- Mit hoher Luft- und Dampf-durchlässigkeit

Polyacrylatkleber

- Hautfreundlich, bindemittelfrei und auf Wasser-Emulsionsbasis

Absorbierendes Wundkissen

- Aus Viskose mit einer wenig haftenden Oberflächenbeschichtung



Mepore ist ein luftdurchlässiger, selbstklebender Verband für wenig bis mittelstark exsudierende Wunden. Der hautfreundliche Kleber basiert auf einer Wasseremulsion, ist bindemittelfrei und ermöglicht dadurch eine sanfte und sichere Haftung.

Mepore®


Mölnlycke®

Anwendungshinweise



Öffnen Sie die Verpackung und entnehmen Sie den Verband.



Die überlappende Schutzfolie in die Hand nehmen und auf die Wunde applizieren.



Verband sanft und spannungsfrei auf der Haut anbringen.

Eigenschaften von Mepore®

Die poröse Struktur des Vliesstoffes stellt die Luft und Wasserdurchlässigkeit sicher. Dieses Material ist dehnbar, anschmiegsam und erlaubt Körperbewegungen. Außerdem ist es nicht absorbierend und behindert ein Durchnässen. Der Polyacrylat-Kleber gewährleistet ein sanftes Kleben und gleichzeitig eine sichere Haftung. Das Wundkissen kann geringe Mengen von Wundflüssigkeiten aufsaugen und die wenig haftende Oberflächenbeschichtung reduziert das Risiko des Verklebens mit der Wunde. Die einfach zu entfernende Schutzfolie ermöglicht eine sterile Applikation.

Vorteile von Mepore®

- Hautfreundlicher Kleber auf Basis einer Wasseremulsion
- Flüssigkeitsabweisend
- Einfach zu entfernende Schutzfolie ermöglicht problemlose Applikation
- Viele verschiedene Größen
- Abgerundete Ecken (bis 9 x 5 cm) für sicheren Halt

Anwendungsgebiete

Mepore kann bei einer Vielzahl von leicht bis mittelstark exsudierenden Wunden eingesetzt werden z.B. für postoperative chirurgische Wunden, Schnittwunden und Hautabschürfungen.

Häufigkeit des Verbandwechsels

Die Häufigkeit hängt vom Zustand der Wunde ab.

Hinweis

Mepore soll nicht unter Spannung angebracht werden. Scherkräfte können eine Verletzung der Haut zur Folge haben. Dies ist besonders wichtig bei der Applikation auf Gelenken.

Bestellinformationen

Home Care

Art.-Nr.	Größe	Größe Wundkissen	PZN/Packung	Stück/Packung
67 07 00	7 x 8 cm	4 x 5 cm	02 83 98 47	55
67 15 00	10 x 11 cm	6 x 6 cm	04 60 82 53	40
67 16 00	11 x 15 cm	6 x 10 cm	04 60 82 76	40
67 11 00	9 x 20 cm	4,5 x 15 cm	03 13 74 03	30
67 12 00	9 x 25 cm	4,5 x 20 cm	03 13 74 32	30
67 13 00	9 x 30 cm	5 x 25 cm	03 13 74 55	30
67 14 00	9 x 35 cm	5 x 30 cm	03 85 27 32	30

Steril – einzeln verpackt

Rollen

33 19 00	4 cm x 5 m	---	03 13 7 478	1
33 20 00	7 cm x 5 m	---	03 13 7 484	1

Unsteril

Klinik

Art.-Nr.	Größe	Größe Wundkissen	Stück/Packung
67 08 00	6 x 7 cm	3 x 4 cm	60
67 09 00	9 x 10 cm	4,5 x 6 cm	50
67 10 00	9 x 15 cm	4,5 x 10 cm	50
67 11 00	9 x 20 cm	4,5 x 15 cm	30
67 12 00	9 x 25 cm	4,5 x 20 cm	30
67 13 00	9 x 30 cm	5 x 25 cm	30
67 14 00	9 x 35 cm	5 x 30 cm	30

Steril – einzeln verpackt

Rollen

33 19 00	4 cm x 5 m	---	1
33 20 00	7 cm x 5 m	---	1

Unsteril

Erfahren Sie mehr unter www.molnlycke.de

Mölnlycke Health Care GmbH, Grafenberger Allee 297, 40237 Düsseldorf, Tel +49 211 920 88 0, Fax +49 211 920 88 170.
Mölnlycke® und das Produkt Mepore® sowie die entsprechenden Logos sind weltweit eingetragene Marken eines oder mehrerer Mitglieder der Mölnlycke Health Care Unternehmensgruppe. © 2019 Mölnlycke Health Care AB. Alle Rechte vorbehalten. DWC0047


Mölnlycke®