

Leitfaden für Dekubitus im Zusammenhang mit medizinischen Geräten – Mepilex® Lite


Mepilex® Lite schützt die Haut. Es nimmt Feuchtigkeit auf und schützt nachweislich die empfindliche Haut vor äußeren Kräften wie Reibung und Druck, die durch die lange Anwendung von medizinischen Geräten entstehen.^{1,2}

Haftungsausschluss: Über die prophylaktische Verwendung von Verbänden zur Risikominimierung von Dekubitus durch medizinische Geräte wird berichtet, jedoch wurde ihre Verwendung unter PPE im Hinblick auf die Aufrechterhaltung der Dichtigkeit und möglichen Auswirkung auf die Virusübertragung unseres Wissens nach weder von Mölnlycke noch von anderen getestet.

- Mepilex Lite lässt sich leicht in die gewünschte Form schneiden
- Die Trägerfolie erst nach dem Zuschneiden entfernen
- Mepilex Lite haftet durch die Safetac®-Technologie³ sanft auf der Haut



Die Grafiken veranschaulichen verschiedene Einsatzmöglichkeiten zum Schutz der Haut bei der Verwendung medizinischer Geräte

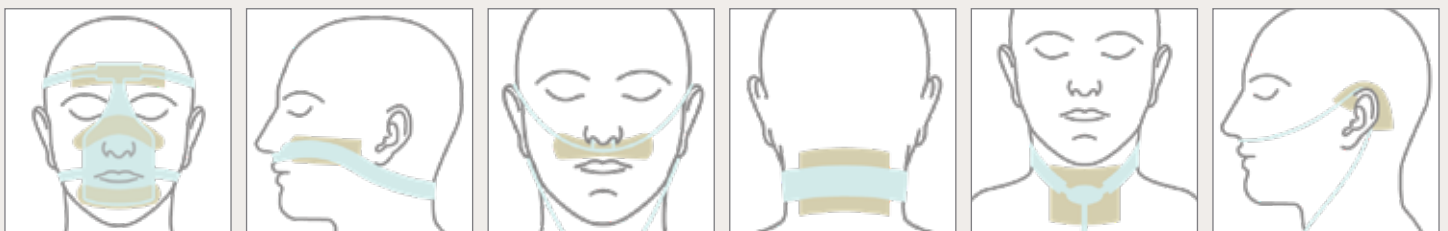


Mepilex® Lite


Mölnlycke®


Schnittanleitung

Wählen Sie die geeignete Verbandgröße, um den betroffenen Bereich abzudecken, und schneiden Sie den Verband so zu, dass er sich an die individuellen Bedürfnisse des Patienten/der Körperkonturen oder Geräteformen anpasst. Bringen Sie die haftende Seite auf die Haut auf.

Beispiele:

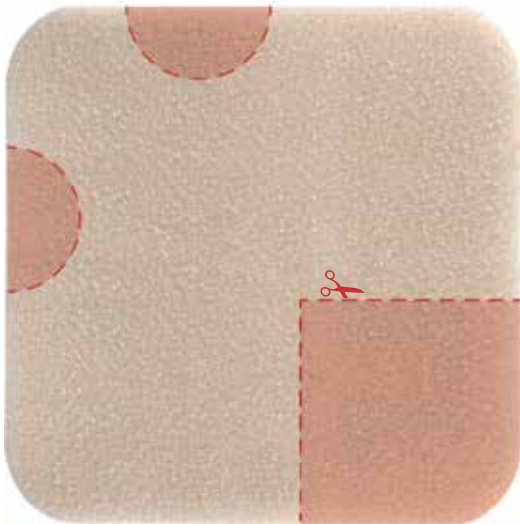


Beatmungsmaske

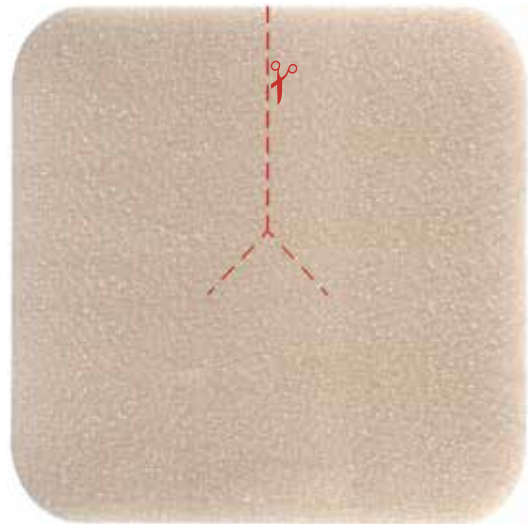

Tracheostoma



Beatmungsmaske

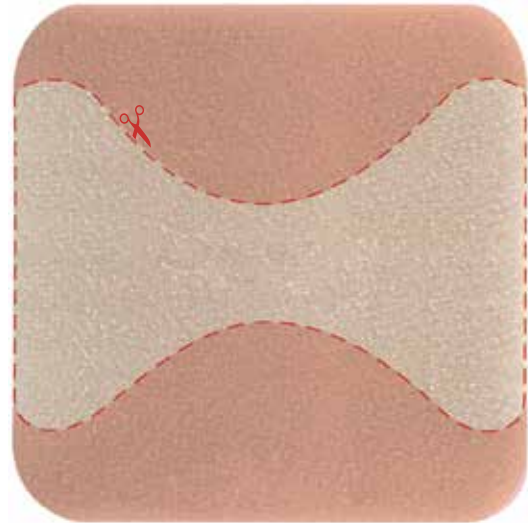

Sauerstoffbrille

SafetaC
TECHNOLOGY

Bestellinformationen

Home Care

Art.-Nr.	Größe	PZN/Packung	Stück/Packung	Stück/Karton
28 40 10	7,5 x 8,5 cm	03 64 24 43	5	70
28 41 10	12,5 x 12,5 cm	03 64 27 27	5	50
28 43 10	17,5 x 17,5 cm	03 64 27 79	5	35
28 45 00	20 x 50 cm	09 89 16 96	4	24

Steril – einzeln verpackt

Haftungsausschluss: Die hier zur Verfügung gestellten Informationen sind nicht als Ausübung der ärztlichen Tätigkeit zu verstehen und ersetzen nicht das unabhängige medizinische Urteil eines behandelnden Arztes. Diese Informationen beinhaltet, ist aber nicht darauf beschränkt, Vorschläge für die Tragedauer, die Produktauswahl und die vorgeschlagene Anwendung des Produkts, basierend auf Verallgemeinerungen. Sie berücksichtigt nicht die einzigartige Charakteristik der Wunde eines Patienten. Der jeweilige behandelnde Arzt bleibt allein verantwortlich für die Beurteilung des Schweregrades der Wunden, die Bestimmung der geeigneten Behandlung und das Management der Wundbehandlung.

References: 1. Boesch RP, Myers C, Garrett T et al. Pediatrics. 2012;129: e792–e797. 2. Cohen LP, Ovadia-Blechman Z, Hoffer O, Gefen A. Int Wound J. 2019; 1-14. 3. White, R. A multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK 2008;4(1):14-22.

Erfahren Sie mehr unter www.molnlycke.com

Mölnlycke Health Care GmbH, Grafenberger Allee 297, 40237 Düsseldorf, Tel +49 211 920 88 0, Fax +49 211 920 170. Mölnlycke®, Mepilex®, SafetaC® sowie die entsprechenden Logos sind weltweit eingetragene Marken eines oder mehrerer Mitglieder der Mölnlycke Health Care Unternehmensgruppe. © 2020 Mölnlycke Health Care. Alle Rechte vorbehalten. DWC0085

Klinik

Art.-Nr.	Größe	Stück/Packung	Stück/Karton
28 40 00	6 x 8,5 cm	5	70
28 41 00	10 x 10 cm	5	50
28 43 00	15 x 15 cm	5	50
28 45 00	20 x 50 cm	4	24

Steril – einzeln verpackt


Mölnlycke®