

Guide för förbandsbyte vid egenvård

Din sjuksköterska har valt förbandet Mextra® Superabsorbent för ditt sår

Så här använder du förbandet Mextra® Superabsorbent:

1. Tvätta händerna noggrant med tvål och varmt vatten i 20 sekunder.
2. Rengör såret enligt din sjuksköterskas anvisningar.
3. Applicera Mextra Superabsorbent direkt på såret med förbandets vita sida mot såret. Den blå sidan ska vara uppåt.



4. Dynan ska överlappa den torra omkringliggande huden.
5. Fixera Mextra Superabsorbent med t.ex. ett lämpligt bandage eller tejp enligt din sjuksköterskas rekommendation.



Glöm inte:

- ✓ Klipp inte i förbandet.
- ✓ Mextra är avsett för engångsbruk och ska inte återanvändas.




När ska förbandet bytas?

Din sjuksköterska råder dig att byta förbandet när:

För mer vägledning och information, kontakta din sjuksköterska:

Om du har tillgång till internet kan du titta på en film om hur du applicerar förbandet genom att klicka på denna länk (eller använd din telefon för att skanna koden):

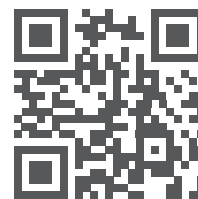

www.molnlycke.com/mextra-application

Mextra Superabsorbent bör hanteras och appliceras av vårdpersonal, men om ingen utbildad vårdpersonal är tillgänglig kan du själv eller en familjemedlem sköta förbandsbytet. Om andra personer än utbildad vårdpersonal sköter förbandsbytet tar Mölnlycke Health Care inget ansvar för hur appliceringen av förbandet utförs, eller konsekvenser därav. Om Mextra Superabsorbent appliceras av någon annan än en utbildad vårdpersonal sker det helt på användarens eget ansvar.

Läs mer på www.molnlycke.se

Mölnlycke Health Care AB, P.O. Box 13080, Gamlestadsvägen 3 C, SE-402 52 Göteborg. Tel.: + 46 31 722 30 00. Varumärkena, namnen och logotyperna Mölnlycke och Mextra är globalt registrerade av ett eller flera företag i Mölnlycke Health Care Group. ©2020 Mölnlycke Health Care AB. Med ensamrätt. HQIM001626_b


Mölnlycke®