



## Användarguide:

# Operationsmunskydd med öronband

- A. Trä in dina fingrar i öronbanden. Placera operationsmunskyddet så att det täcker både din näsa och mun.
- B. Placera öronbanden runt öronen och vik ut munskyddet. Detta för att minimera de antal lager som du behöver andas igenom.
- C. Forma näsklämman.
- D. När det finns risk för vätskestänk, använd då ett 4-lagers stänksäkert operationsmunskydd med integrerat visir eller ett 4-lagers stänksäkert operationsmunskydd och skyddsglasögon eller visir. Byt munskydd när det har kontaminerats samt mellan operationer.
- E. Släng operationsmunskyddet efter användning.