



Käyttöohjeet

Kasvonsuoja korvalenkeillä

- Työnnä sormesi korvalenkkiin läpi. Nenävahvike tulee ylöspäin. Aseta kasvonsuoja nenän ja suun päälle.
- Aseta korvalenkit korvien ympärille. Vedä kasvonsuojaa ylhäältä ja alhaalta avataksesi sen kokonaan. Näin peität kasvot maksimaalisesti ja minimoit kerrokset, joiden läpi hengität.
- Muotoile nenävahvike nenän muotoiseksi.
- Korvat ja hiukset on peitettävä sopivalla päähineellä hiusten ja muiden hiukkasten leviämisen estämiseksi. Jos on olemassa riski altistua kontaminoituneille nesteille, varmista, että valitset 4-kerroksisen roiskekestävän kasvonsuojan visiirillä tai käytät 4-kerroksisen kasvonsuojan lisäksi myös suojalaseja tai visiiriä. Vaihda kasvonsuoja kun se on kontaminoitunut, sekä leikkausten välissä.
- Hävitä kasvonsuoja käytön jälkeen.



Käyttöohjeet:

Kasvonsuoja solmittavilla nauhoilla

- A. Muotoile nenävahvike. Aseta kasvonsuoja kasvoillesi siten, että se peittää sekä nenän että suun.
- B. Aseta ylemmät solmittavat nauhat pään päälle ja solmi ne tiukasti, jotta ilmaa ei pääsisi vuotamaan.
- C. Aseta alemmat solmittavat nauhat niskan taakse ja solmi myös ne tiukasti.
- D. Avaa kasvonsuoja aina kokonaan, jolloin läpi hengitettävien kerrosten määrä vähenee.
- E. Vaihda kasvonsuoja kun se on kontaminoitunut, sekä aina leikkausten välissä.
- F. Korvat ja hiukset on peitettävä sopivalla päähineellä hiusten ja muiden hiukkasten leviämisen estämiseksi. Jos on olemassa riski altistua kontaminoituneille nesteille, varmista, että valitset 4-kerroksisen roiskeenkestävän kasvonsuojan visiirillä tai käytät 4-kerroksisen kasvonsuojan lisäksi myös suojalaseja tai visiiriä.
- G. Hävitä kasvonsuoja käytön jälkeen.



Käyttöohjeet Kasvonsuoja visiirillä

Jos on olemassa riski altistua kontaminoituneille nesteille, varmista, että valitset 4-kerroksisen roiskeenkestävän kasvonsuojan visiirillä tai käytät 4-kerroksisen kasvonsuojan lisäksi myös suojalaseja tai visiiriä.

- Ennen kuin otat kasvonsuojan käyttöön, taivuta visiirin sivut valmiin taitteen kohdalta taaksepäin. Taitellut sivut suojaavat sivuilta tulevia roiskeita vastaan, jotka muuten voivat roiskua silmiin.
- Muotoile nenävahvike.
- Avaa kasvonsuoja kokonaan.
- Aseta kasvonsuoja kasvoillesi siten, että se peittää sekä nenän että suun.
- Aseta ylemmät solmittavat nauhat pään päälle ja solmi ne tiukasti, jotta ilmaa ei pääsisi vuotamaan.
- Aseta alemmat solmittavat nauhat niskan taakse ja solmi myös ne tiukasti.
- Avaa kasvonsuoja aina kokonaan, jolloin läpi hengitettävien kerrosten määrä vähenee.
- Vaihda kasvonsuoja kun se on kontaminoitunut, sekä aina leikkausten välissä.
- Hävitä kasvonsuoja käytön jälkeen.