


Byte av sug- och spolmunstycke




1. Håll sug- och spolmunstycket med ena handen och den andra handen på sug- och spolhandtaget.



2. Placera tummen mot kopplingsringen där munstycket sitter. Tryck ringen mot sug-och spolhandtaget samtidigt som röret dras ur sug-och spolhandtaget.

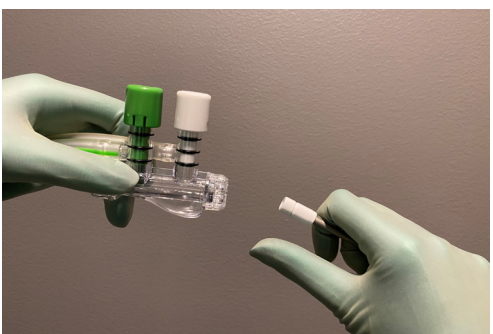

3. Sug- och spolmunstycket lossas och kan bytas mot ett nytt sug- och spolmunstycke.

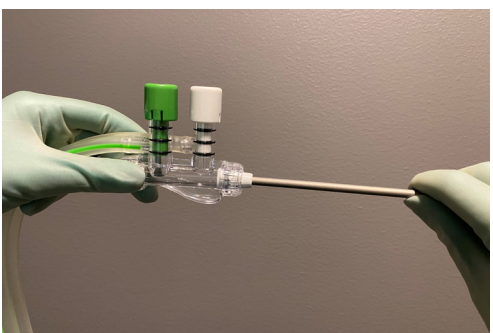

4. Tryck in det nya sug- och spolmunstycket i sug- och spolhandtaget.

Läs mer på www.molnlycke.se

Mölnlycke Health Care AB, P.O. Box 13080, Gamlestadsvägen 3 C, SE-402 52 Göteborg, Sweden. Phone + 46 31 722 30 00
The Mölnlycke trademark, name and logo is registered globally to one or more of the Mölnlycke Health Care group of companies.
© 2020 Mölnlycke Health Care AB. All rights reserved. RNSU0072008


Mölnlycke[®]