



Krytie z hydrovlákna

- Vysoká retenčia zabraňuje úniku tekutiny a macerácii
- Vysoká pevnosť v ťahu pre jednoduché odstránenie krytia v jednom kuse
- Absorbuje a uzamkne exsudát, krv a baktérie
- Vysoko savé krytie aj pod kompresiou
- Mäkké a prispôsobivé krytie pre jednoduché použitie

A diagram showing a rectangular, light-colored hydrofiber dressing. One corner is folded back, revealing a white, fibrous inner layer. Two green lines with dots at the end point from text blocks to the top and bottom layers of the dressing.


Vysoká retenčná schopnosť

- Zabraňuje úniku tekutiny
- Zabraňuje macerácii
- Absorbuje a uzamkne exsudát, krv a baktérie


Hydrovlákno

- Vynikajúca pevnosť vlákien v ťahu
- Odstránenie krytia v jednom kuse
- Šetrí čas ošetrojúcemu personálu a zvyšuje komfort pacienta

Ako používať Exufiber

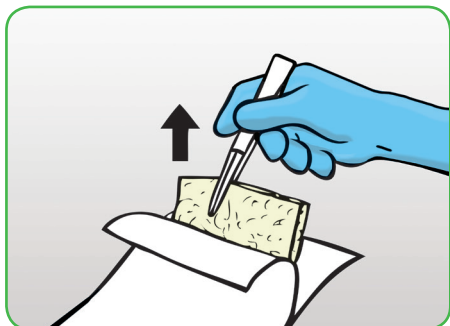


1. Očistite ranu fyziologickým roztokom alebo vodou. Dôkladne osušte okolitú kožu.

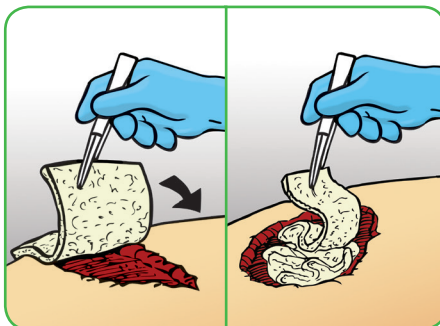

2. Aplikujte Exufiber na ranu

2. Tamponádu vložte voľne do rany aby mala priestor k absorpcii exsudátu

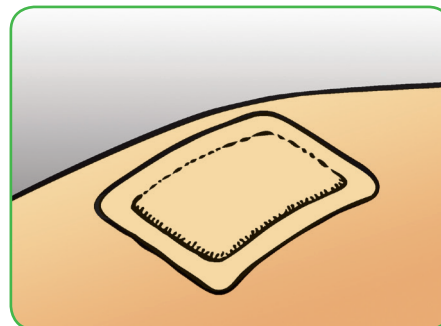

3. Zafixujte alebo prekryte vhodným sekundárnym obvázom. Môže byť použité aj adhezívne krytie. Exufiber môže byť použitý aj pod kompresnú terapiu.

Ako Exufiber funguje

Exufiber je sterilné netkané krytie vyrobené z vysoko savých vlákien polyvinylalkoholu. Pri styku s exsudátom z rany sa Exufiber mení v gél, ktorý prispieva k vytváraniu vlhkého prostredia v rane a ľahkému odstráneniu pri preväzoch. Exufiber absorbuje a uzamkne exsudát z rany. K dipozícii vo viacerých rozmeroch.

Výhody krytia Exufiber

- Vysoká pevnosť v ťahu pre jednoduché odstránenie v jednom kuse pri preväzoch
- Vysoká retenčná kapacita ako prevencia presiaknutia exsudátu a následnej macerácie
- Absorbuje a uzamkne exsudát, krv a baktérie
- Vysoko absorpčné aj pod kompresnou terapiou
- Mäkké a prispôsobivé krytie pre jednoduché použitie
- Môže byť ponechaný na mieste po dobu až 7 dní a v prípade odberových plôch až 14 dní

UPOZORNENIE

Všetky rany je potrebné kontrolovať. V prípade klinických známok infekcie sa poraďte so svojím ošetrovateľom o najvhodnejšom postupe. Exufiber nie je vhodný pre suché rany či hlboké popáleniny. V prípade, že krytie vyschne a je ťažké ho pri preväze odstrániť, navlhčite ho v súlade s miestnymi postupmi (napr. fyziologický roztok, sterilná voda) a nechajte odmočiť kým sa nedá ľahko nadvíhnuť. Premena Exufiberu v gél môže trvať niekoľko minút. Krytie potom jemne odstráňte.

Použitie

Exufiber je určený na široký rad exsudujúcich rán:

- Vredy predkolenia a vredy spojené s diabetickou nohou
- Dekubity
- Popáleniny II.stupňa
- Chirurgické rany - Odberové plochy
- Malígne rany
- Kožné lézie a iné traumatické rany

Platí pre plošné krytie aj krytie určené do dutín.



Prehľad veľkostí Exufiber (sterilné balenie)

Číslo výrobku	Veľkosť v cm	ks v balení	ks v kartóne
603301	10x10	10	40
603302	15x15	10	60
603303	20x30	5	20
603304	2x50	5	20

Viac nájdete na www.molnlycke.com alebo www.molnlycke.cz

Mölnlycke Health Care s.r.o., Hájkova 22, 13000 Praha 3, telefón +420 221 890 517

Logá a názvy Mölnlycke Health Care a Exufiber® sú registrované známky jednej alebo viacerých spoločností Mölnlycke Health Care Group of Companies. © 2014 Mölnlycke Health Care AB. Všetky práva vyhradené.