




Samolepící fixace

Mefix je ideální fixací obvazů, krytí, katetrů a kanyl. Zajistí vám bezpečnou fixaci. Lepidlo je šetrné k pokožce.

Předměřený ochranný papír vám usnadní stanovení přesné velikosti

Vlnovitá perforace ochranného papíru umožňuje snadnou manipulaci při odstraňování jeho jednotlivých částí

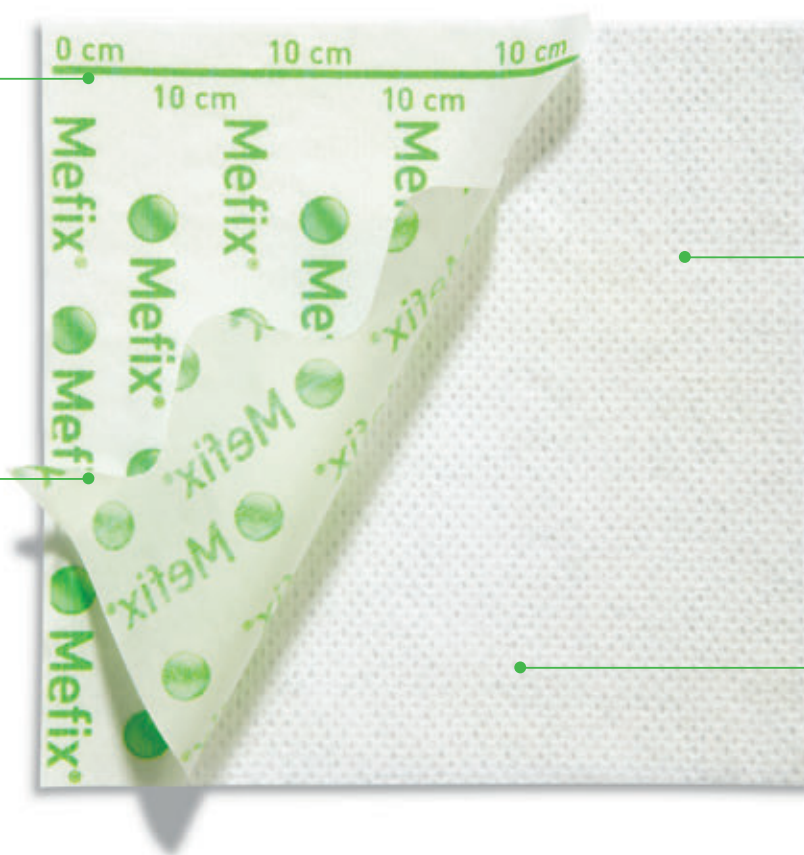

Polyakrylátové lepidlo na vodní bázi a bez rozpouštědel je šetrné ke kůži a umožňuje bezpečnou a šetrnou fixaci.

Měkký, pružný a neabsorpční netkaný materiál je pohodlím pro vaše pacienty

Jak Mefix funguje

Porézní struktura netkaného materiálu umožňuje propustnost pro vzduch a vodní páru. Materiál je elastický, dobře se přizpůsobuje konturám těla a po aplikaci umožňuje pohyb bez omezení. Materiál je neabsorpční a vytváří bariéru proti prosáknutí krve a tekutin. Polyakrylátové lepidlo na bázi vody bylo navrženo tak, aby bylo jemné ke kůži, ale zároveň zajišťovalo bezpečnou fixaci. Snadno odstranitelný

ochranný papír je předměřen na 10 cm úseky. Vlnovitá perforace usnadňuje odstranění a aplikaci. Mefix může být snadno stříhán na požadovaný tvar a velikost.

Oblasti použití

Mefix může být použit v celé řadě situací, kde je požadována fixace, např. pro fixace obvazů, krytí, katetrů a kanyl.

Jak Mefix používat – fixace pomocí vlnité linky



Ustříhnete potřebnou délku.



Oddělte dvě části ochranného papíru tak, že Mefix mírně natáhnete a ohnete. Odstraňte úzkou část.



Přiložte část s odkrytou lepící částí na pokožku. Odstraňte zbývající ochranný papír. Pevně Mefix uhladte, abyste docílili dobré adheze. Mefix při aplikaci nenatahujte.

Výhody Mefixu

- Lepidlo na vodní bázi, bez rozpouštědel, šetrné ke kůži
- Předměřený ochranný papír usnadňuje odměření a stříhání
- Dobře se přizpůsobuje konturám těla
- Prodyšný, zabraňuje rozmočení a poskytuje lepší komfort
- Lze ho sterilizovat párou nebo etylenoxidem

Upozornění

Při aplikaci Mefixu je třeba dbát na to, aby nebyl nalepen napnutý, jinak by mohlo dojít působením posouvacích sil k poškození kůže. To je obzvláště důležité při aplikaci na klouby.



Mefix je nesterilní, balený v 10 metrových rolích v krabici s otvorem.

Číslo výrobku	Velikost cm	Počet ks v balení/kartonu	Kód VZP	Min. preskripce v balení/v ks
31 02 50	10 m x 2,5 cm	1/40	0080180	-/1
31 05 00	10 m x 5 cm	1/40	0080181	-/1
31 10 00	10 m x 10 cm	1/20	0080182	-/1
31 15 00	10 m x 15 cm	1/22		
31 20 00	10 m x 20 cm	1/10		
31 30 00	10 m x 30 cm	1/12		