


Melgisorb® Ag

Vysoko absorbčné antimikrobiálne alginátové krytie

- Absorbuje až o 45% viac než najpoužívanejšie krytie so striebrom vyrobené z hydrovlákna
- Vysoká sila vlákien dovoľuje jeho odstránenie bez zanechania zvyškov v rane

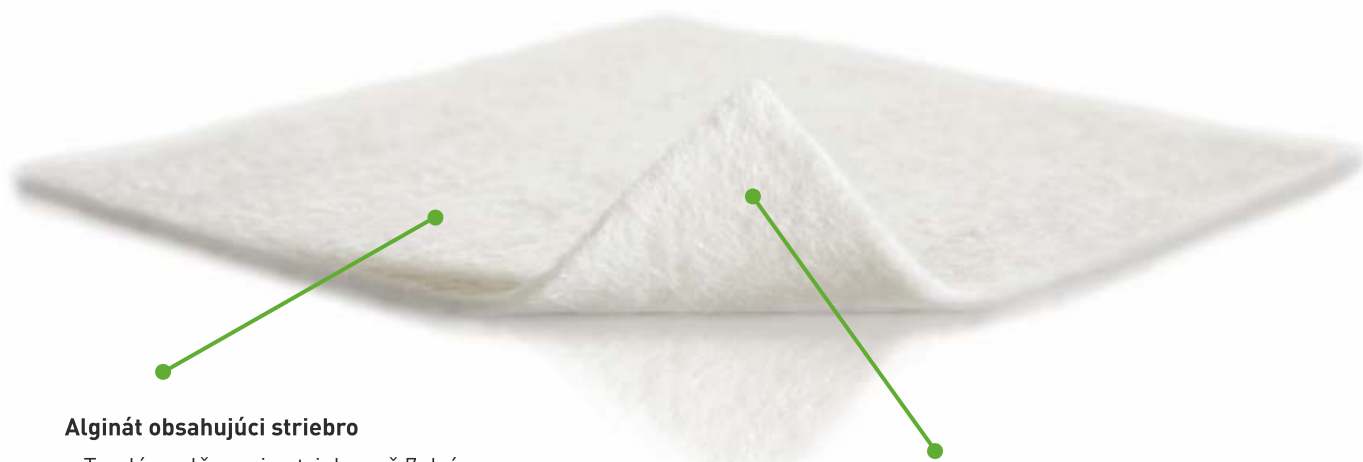

Alginát obsahujúci striebro


- Trvalé uvoľňovanie striebra až 7 dní
- Rýchly antimikrobiálny efekt behom 4dní
- Trvalý antimikrobiálny efekt až po dobu 4 dní

Alginát s CMC* vláknom


- Vynikajúca absorpcia pre veľmi exsudujúce rany
- Veľká pevnosť za vlhka - umožňuje odstránenie v jednom kuse
- Nasáva zo strán - zamedzuje vzniku macerácie

*carboxymethylcellulose


Ako Melgisorb Ag použiť

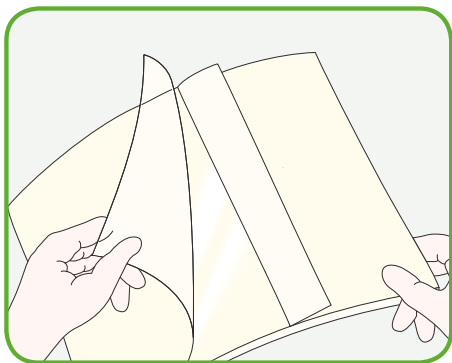

Vyčistite a prepláchnite ranu podľa štandardných postupov. Vyberte veľkosť Melgisorbu Ag, ktorá je o niečo menej väčšia ako veľkosť rany. Vystrihnite alebo zložte krytie tak, aby vyplnilo ranu.

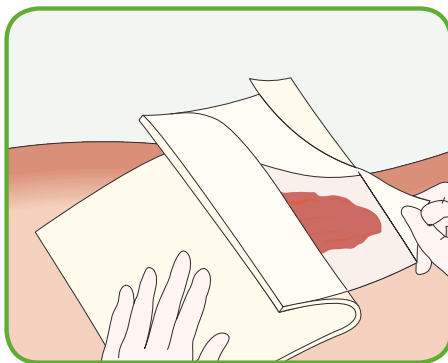

Voľne vyplňte hlboké rany a uistite sa, že krytie neprekrýva okraje rany. Aplikujte priamo do lôžka rany.

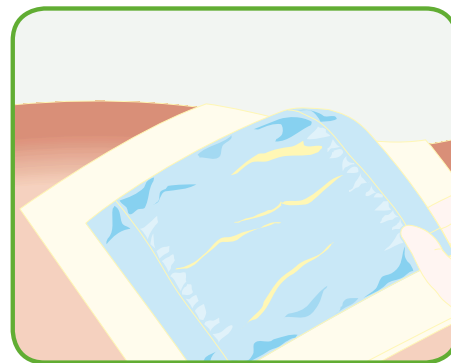

Prekryte a zaistite Melgisorb Ag sekundárnym krytím.

Oblasti použitia

Melgisorb Ag je indikovaný pre stredne až vysoko exsudujúce povrchové a hlboké rany ako napr.:

- pooperačné rany
- traumatické rany (kožné lézie, traumatické poranenia, rezné rany)
- vredy predkolenia
- dekubity
- diabetické vredy

Produkt môže byť tiež použitý pod kompresnú bandáž. Vzhľadom k tomu, že výrobok obsahuje algináty, môže byť použitý na kontrolu krvácania pri povrchových ranách. Melgisorb Ag je vhodný aj na kriticky kolonizované rany pod lekárskej dohľadom. Melgisorb Ag je určený len na vonkajšie použitie.

Poznámka

Frekvencia výmeny krytia závisí na stave rany a úrovne exsudátu. Spočiatku ho môže byť nutné meniť každých 24 hodín. Pokiaľ je rana príliš suchá, navlhčite krytie fyziologickým roztokom pred odstránením alginátu z rany. Jemne odstráňte krytie z lôžka rany. Pred aplikáciou nového krytia, prepláchnite oblasť rany podľa štandardných postupov.

Kontraindikácie

Melgisorb Ag nie je indikovaný na použitie v nasledujúcich prípadoch:

- osoby s precitlivosťou na algináty alebo striebro
- chirurgické implantácie
- kontrola ťažkého krvácania
- priame použitie na suché, alebo málo exsudujúce rany

Upozornenie

- Systémová antimikrobiálna terapia musí byť zvážená v prípade infekcie v rane. Melgisorb Ag môže byť pod lekárskej dohľadom použitý spoločne so systémovými antibiotikami.
- Krytie sa môže prilepiť do rany, ak bolo použité na suché, alebo málo exsudujúce rany. Ak sa krytie nedá z rany ľahko odstrániť, navlhčite ho fyziologickým roztokom pred jeho odstránením.
- Účinok krytia môže byť ovplyvnený nadmerným používaním masť obsahujúcich vazelinu.



Prehľad veľkostí výrobku Melgisorb Ag

Kód ŠÚKL	Číslo výrobku	Veľkosť v cm	KS v balení	KS v kartóne
A82758	256050	5x5	10	100
A82759	256100	10x10	10	100
A82760	256150	15x15	10	100
A82761	256200	20x30	5	50
A82762	256600	3x44	10	100