

Mepore® Film&Pad

Prodyšné, průhledné, samolepící absorpční krytí

Mepore Film&Pad je průhledné, samolepící absorpční krytí. Tento aplikační systém byl navržen na co nejjednodušší použití. Diskrétní design přitahuje menší pozornost, což pacientovi umožňuje pohodlnější nošení.




Jak krytí Mepore Film&Pad funguje

Díky vysoce absorpčnímu polštářku a vysoké prodyšnosti ochranné fólie nabízí Mepore Film&Pad velmi dobrý management exsudátu, přičemž se skvěle přizpůsobuje nerovnostem povrchu a obrysům těla. Polyakrylátové adhezivum je šetrné k pokožce, ale zároveň účinně fixuje. Krytí Mepore Film&Pad je jednoduché na aplikaci a použitelné pro širokou škálu ran.

Oblasti použití

Mepore Film&Pad lze použít na širokou škálu ran s nízkou až střední secernací. Patří zde především operační rány, řezy a abraze.

Jak Mepore Film&Pad použít

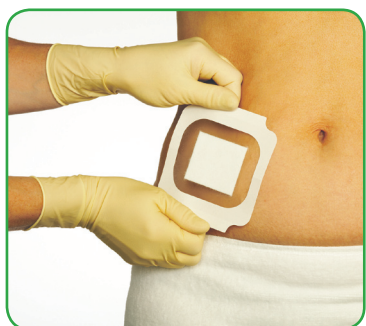

Odstraňte ochrannou fólii.
Krytí umístěte do správné polohy.
Při aplikaci krytí nenatahujte.



Při aplikaci odstraňte papírové okraje
a oba bílé štítky.



Pro zajištění správné fixace
vyhlaďte případné nerovnosti.

Výhody krytí Mepore Film&Pad

- Šetrné membránové krytí rány
- Vysoce prodyšné
- Vynikající zvládnání tekutin
- Jednoduchá aplikace i v rukavicích
- Přizpůsobivé konturám těla
- Odolné proti virům a bakteriím
- Jemná, ale bezpečná fixace
- Adhezivum šetrné k pokožce
- Umožňuje sprchování
- Široký sortiment

Upozornění

Krytí Mepore Film&Pad by neměli používat pacienti citliví na akrylové lepidlo.



Přehled velikostí Mepore Film&Pad

Číslo výrobku	Velikost cm	Ks v balení	Ks v kartonu
275100	4 x 5	85	340
275200	5 x 7, ovál	85	340
275300	5 x 7	85	340
275400	9 x 10	30	180
275500	9 x 15	30	240
275600	9 x 20	30	240
275800	9 x 30	25	125
275900	9 x 35	25	100

Mölnlycke Health Care, s.r.o.
Hájkova 2747/22, 130 00 Praha 3
Tel. +420 221 890 517
Fax +420 224 817 582
www.molnlycke.com



Symbol a značka slova jsou registrované obchodní značky společnosti Mölnlycke Health Care.