


Mepore® IV

Transparentní, prodyšné filmové i.v. krytí

Mepore IV je transparentní samolepící i.v. krytí ideální pro fixace intravenózních vstupů, jako jsou i.v. katétry a pod. Systém aplikace krytí Mepore IV umožňuje snadné použití.

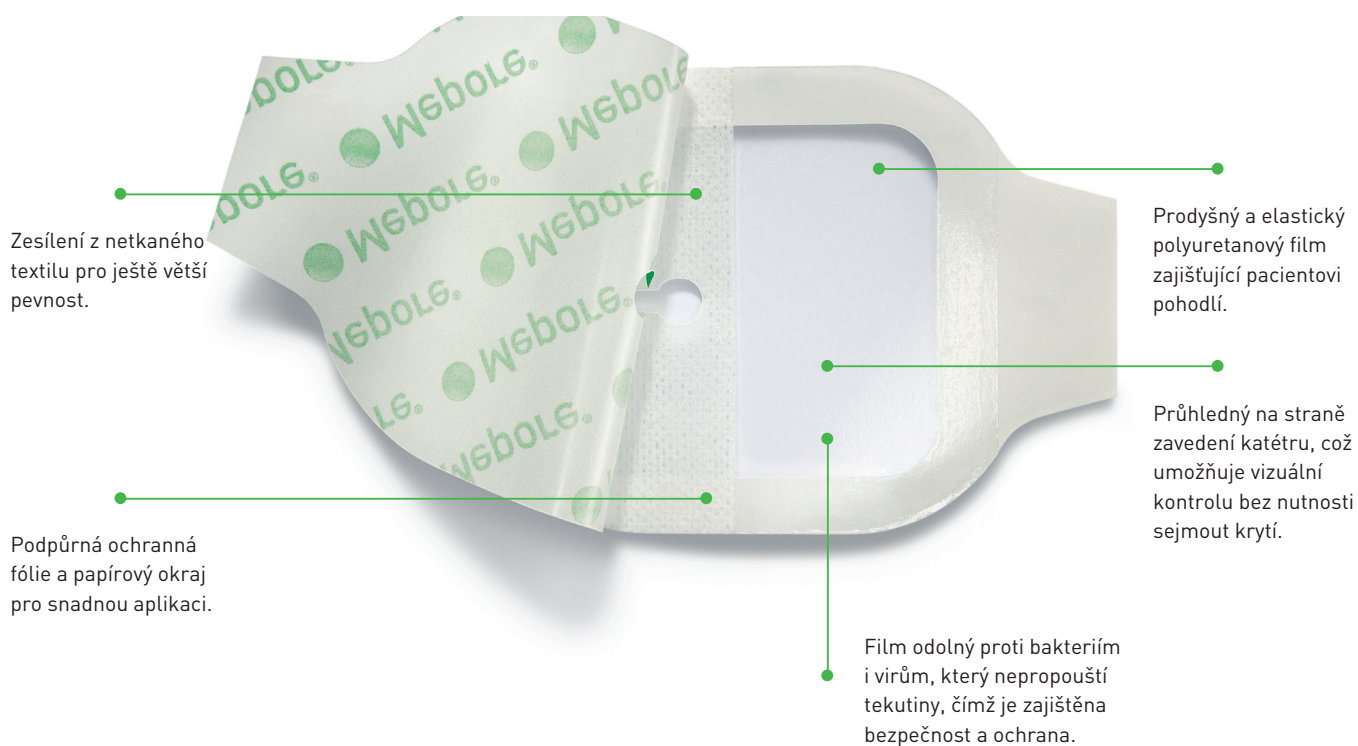

Jak krytí Mepore IV funguje

Krytí Mepore IV zajišťuje bezpečnou a flexibilní fixaci intravenózních kanyl. Díky transparentnímu filmu odolnému vůči průniku virů a bakterií je zaručena bariéra, jež zamezuje kontaminaci zvenčí. Jelikož Mepore IV má velmi vysokou propustnost pro vodní páry, může jím pronikat přebytečná vlhkost z povrchu kůže. Zesílení z netkaného textilu poskytuje ještě větší pevnost pro spolehlivou fixaci.

Polyakrylátové lepidlo bylo vyvinuto tak, aby bylo šetrné ke kůži, ale zároveň zajistilo bezpečnou fixaci.


Aplikační systém s ochrannou fólií, papírovým okrajem a dostatečně velkou postranní částí umožňuje snadnou aplikaci.

Oblasti použití


Krytí Mepore IV je určeno k fixaci intravenózních kanyl, jako jsou:

- i.v. katétr
- periferní katétr
- centrální katétr
- pediatrické katétr


Jak krytí Mepore IV používat

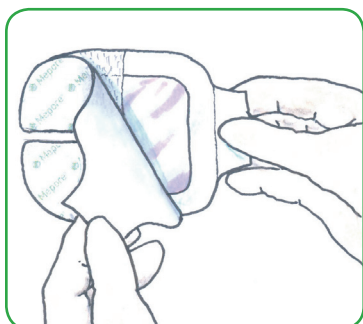

Otevřete sáček a vyjměte krytí. Držte krytí za postranní část a odstraňte ochranný papír.

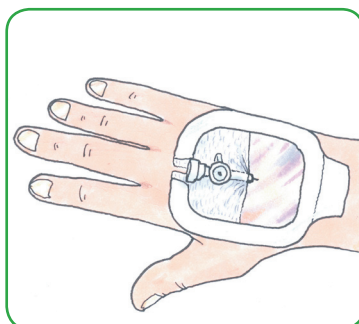

Ujistěte se, že je kůže před aplikací čistá a suchá. Umístěte krytí přes katétr. Dbejte na to, aby transparentní film zakrýval místo vstupu.

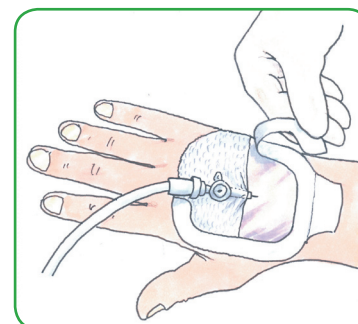


Odstraňte papírový okraj. Pevně krytí na kůži vyhladte, aby bylo docíleno řádné adheze. Odstraňte postranní část. Při aplikaci krytí nenapínejte.

Výhody krytí Mepore IV

- Spolehlivá a bezpečná fixace
- Lepidlo šetrné ke kůži
- Zesílení z netkaného textilu pro ještě větší pevnost
- Transparentní místa pro možnost vizuální kontroly strany zavedení katétru
- Prodyšnost
- Snadno se přizpůsobí obrysům těla a kožním nerovnostem
- Film odolný vůči bakteriím a virům
- Nepropouští tekutiny
- Snadná aplikace při použití i v rukavicích

Upozornění

Pomocí krytí Mepore IV nefixujte zařízení pro podporu životních funkcí pacienta. Krytí Mepore IV nenahrazuje šití nebo jiné primární metody uzavření ran.

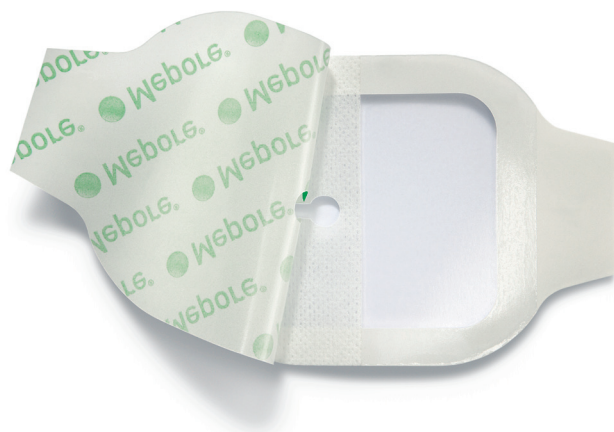

Přehled velikostí Mepore IV

Číslo výrobku	Velikost cm	Ks v balení	Ks v kartonu
274000	5,5 x 5	100	600
274200	8 x 9	70	210
274400	10 x 11	70	210

Mölnlycke Health Care, s.r.o.
Hájkova 2747/22, 130 00 Praha 3
Tel. +420 221 890 517
Fax +420 224 817 582
www.molnlycke.com



Symbol a značka slova jsou registrované obchodní značky společnosti Mölnlycke Health Care nebo značky o jejíž registraci již firma zažádala.