




Samolepiace absorpčné krytie

Krytie Mepore je priedušné, má samolepiacu schopnosť a ideálne sa hodí na ošetrovanie slabo až stredne eksudujúcich rán. Šetrné polyakrylátové lepidlo na vodnom základe a bez rozpúšťadiel zaisťuje jemnú, ale pevnú fixáciu.

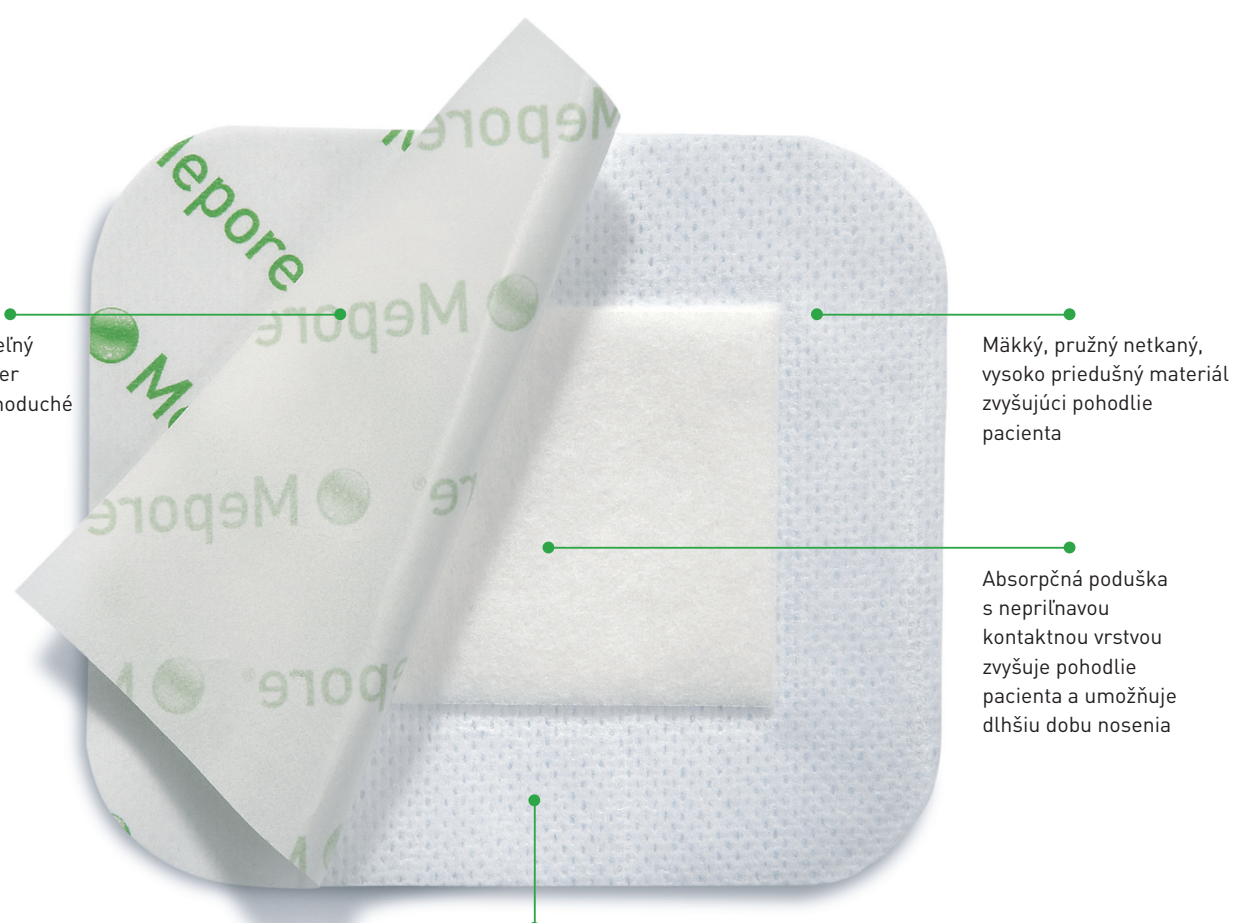

Lahko snímateľný ochranný papier umožňuje jednoduché použitie

Mäkký, pružný netkaný, vysoko priedušný materiál zvyšujúci pohodlie pacienta

Absorpčná poduška s nepriľnavou kontaktnou vrstvou zvyšuje pohodlie pacienta a umožňuje dlhšiu dobu nosenia

Polyakrylátové lepidlo, šetrné ku koži, zaisťuje jemnú a bezpečnú fixáciu

Ako funguje krytie Mepore

Vďaka poréznej štruktúre netkanej textílie môže koža pod krytím dýchať a pot sa môže odparovať. Materiál sa dobre prispôsobí tvaru tela a nebráni prípadnému pohybu. Textília nemá absorpčnú schopnosť a pôsobí ako bariéra brániaca presakovaniu krvi a tekutín. Špeciálne vyvinuté polyakrylátové lepidlo je šetrné ku koži a zároveň bezpečne drží. Poduška má schopnosť absorbovať primerané množstvo tekutín a je vybavená príľnavou vrstvou, ktorá znižuje riziko prilepenia sa na ranu.

Ako používať Mepore



Otvorte obal a vyberte z neho krytie.



Uchopte obidva, vzájomne sa prekrývajúce ochranné papiere a odkrývajte lepiaci povrch, tak dosiahnete počiatočné priľnutie krytia.



Umiestnite krytie na kožu, tak, aby ste ho nenaťahovali. Opatrne snímte zvyšky ochranného papiera. Uhladte lepiaci okraj, aby krytie správne priľnulo. Pri použití krytie nenapínajte.

Frekvencia preväzov

Frekvencia preväzov závisí od stavu rany, ktorú ošetrujeme. Pri snímaní krytia uchopte okraj krytia a pomaly ho odlepujte od kože v smere rastu chĺpkov.

Výhody krytia Mepore

- Lepidlo na vodnej báze je šetrné ku koži
- Nepriľnavá kontaktná vrstva minimalizuje riziko prilepenia krytia na ranu
- Pružný horný film odpudzuje vodu
- Ľahko snímateľný ochranný papier umožňujú pohodlnú a aseptickú aplikáciu
- Priedušný film bráni macerácii a zvyšuje pohodlie pacienta
- Zaokrúhlené rohy umožňujú pevnú fixáciu (vo všetkých rozmeroch až do 9x15cm)

Upozornenie

Dbajte, aby sa krytie Mepore pri aplikácii nenapínalo – vplyvom ťažných síl by mohlo dôjsť k poškodeniu kože. Osobitnú opatrnosť je potrebné venovať pri aplikácii krytia cez kĺby.



Prehľad veľkostí Mepore

ŠUKL kód	Číslo výroby	Veľkosť v cm	Ks v balení	Ks v kartóne
A73060	670800	6x7	60	480
A73061	670900	9x10	50	400
A73062	671000	9x15	50	400
A73063	671400	9x35	30	180

Sterilné, jednotlivě balené