

BARRIER®

Akut thoraxsæt



- Procedurespecifik afdækning til thoraxkirurgi, med integreret incisionsfilm
- Bredt og langt incisionsområde øger fleksibiliteten og gør det muligt at nå lysken
- Høj absorption skaber et tørt arbejdsområde
- Integrerede væskeopsamlingsposer/ instrumentposer
- Væsketæthed overalt på afdækningen, hvilket giver øget beskyttelse mod væskegennemtrængning og forebygger bakteriel migration gennem afdækningen - for at hjælpe med at beskytte mod infektion
- Ekstra produkter så som slangeholdere og perineal afdækning

Draperingsvejledning



1. Start med at drapere den separate perineal afdækning. Afdækning med klæb, 75 x 75 cm, kan bruges som en ekstra beskyttelse for halsområdet.



2. Fjern den øverste del af beskyttelsespapiret fra akut thorax afdækningen. Bemærk retningen på piktogrammet.



3. Fastgør akut afdækningen over hals og bryst. Fjern den nederste del af beskyttelsespapiret og fiksér afdækningen.



4. Fold hver side af afdækningen ud.




5. Fold den resterende, nederste del af akut afdækningen ud over patienten.



6. Fold den øverste del af afdækningen ud over anæstesiøjlen. Tapen kan fikses på anæstesiøjles sider.



7. Fiksér de separate slangeholdere og defibrillator posen for at afslutte draperingen.

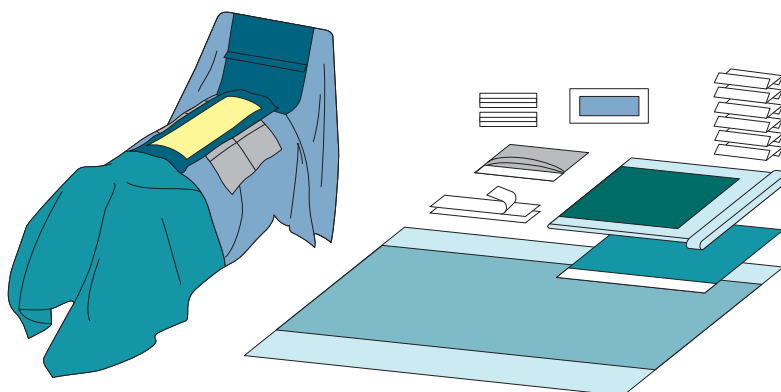

Varenr.	Beskrivelse	Str. (cm)	Pakning
669600	Akut thoraxsæt:		3/6
	1 Forstærket assistancebordspose	79 x 145	
	1 Perineal afdækning	17 x 40	
	6 Papirhåndklæder	18 x 25	
	2 Slangeholder, velcro	2,5 x 30	
	1 Afdækning med klæb	75 x 75	
	1 Defibrillator pose	33 x 38	
	2 OP-tape	9 x 49	
	1 Akut thorax afdækning, incisionsområde 37 x 65 cm	200/300 x 350	
	1 Bordafdækning	150 x 240	

Alt specificeret sætindhold er også tilgængeligt til inklusion i Mölnlycke® procedurepakker.

Varenr.	Mölnlycke® procedurepakke komponent	Str. (cm)
966960	Akut thorax afdækning, incisionsområde 37 x 65 cm	200/300 x 350

Læs mere på www.molnlycke.dk

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 39, 3450 Allerød. Tlf.: +45 80 88 68 10. info.dk@molnlycke.com
Mölnlycke og BARRIER varemærker, navne og logoer er registreret globalt til en eller flere af virksomhederne i Mölnlycke Health Care gruppen. ©2020 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKSU0632005

Mölnlycke®