


BARRIER® Slidslagen med Drisite® Plus til ENT

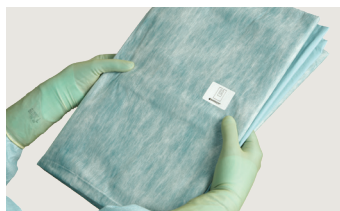

- BARRIER® slidslagener fås i et stort sortiment af størrelser og design. I dette sæt er det tilpasset ENT drapering
- Det patenterede Drisite Plus system giver høj absorption og væskekontrol, uigennemtrængelighed, tilpasning til kroppen og enestående styrke
- Uigennemtrængelig for at forebygge væskegennemtrængning og hjælpe med at beskytte mod infektion
- Meget absorberende og stærkt materiale i den kritiske zone for at kontrollere og transportere væske væk fra såret

Draperingsvejledning



1. Hold slidslagnet mod patienten som vist på piktogrammet.



2. Placér slidslagnet midt på brystet.




3. Fold slidslagnet ud til siderne.



4. Fold slidslagnet ud mod patientens fødder.



5. Fjern beskyttelsespapiret.

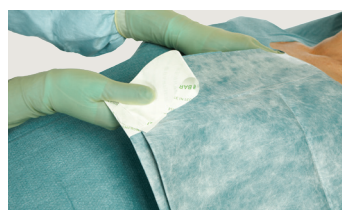

6. Fastgør klæben på en side ad gangen.



7. Placér afdækningen med klæb på kinden.



8. Fold afdækningen ud over patientens hoved eller anæstesiøjlen.

Varenr.	Beskrivelse	Str. (cm)	Pakning
65000	ENT sæt: 1 Assistancebordspose 4 Papirhåndklæde 2 OP-tape 1 Afdækning 1 Afdækning med klæb 1 Slidslagen, slids 7 × 65 cm 1 Bordafdækning	79 × 145 19 × 25 9 × 49 75 × 90 90 × 75 150 × 260 150 × 190	7/14

Alt specificeret sætindhold kan også inkluderes i Mölnlycke® procedurepakker.

Varenr.	Mölnlycke® procedurepakke komponent	Str. (cm)
70509	1 Slidslagen, slids 7 × 65 cm	150 × 260
930200	1 Afdækning med klæb	90 × 75

Læs mere på www.molnlycke.dk

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 39, 3450 Allerød. Tlf.: +45 80 88 68 10. info.dk@molnlycke.com
Mölnlycke, BARRIER og Drisite varemærker, navne og logoer er registreret globalt til en eller flere af virksomhederne i Mölnlycke Health Care gruppen. ©2020 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKSU0612005

Mölnlycke®