

# BARRIER®

## Gyn-/laparoskopisæt



Procedure-specifikke gynækologi afdækning med effektiv væskehåndteringsløsning. BARRIER afdækninger, der er fremstillet i væsketætte materialer, hjælper med at forebygge mikrobiel migration.

- Abdominalhullet er ændret, så det nu er rektangulært i stedet for trekantet, hvilket giver et større og mere fleksibelt arbejdsområde
- Klæb rundt om det abdominale hul for sikker fiksering
- Integreerede benposer



## Draperingsvejledning

1. Beskyttelsespapiret fjernes, og afdækningen vendes i pilens retning. Patientafdækningen placeres på patientens abdomen.

2. Den sterilklædte person står på patientens højre side. Den ene benpose trækkes ud og lægges over benet. Pilen markerer retningen. Dette gentages på venstre side.

3. Resten af afdækningen foldes op over anæstesiøjlen. Klæbekanten under vaginalhullet kan evt. fikseres til perinæum.

4. Afdækningsstykket med klæb kan evt. anbringes over vaginalhullet.

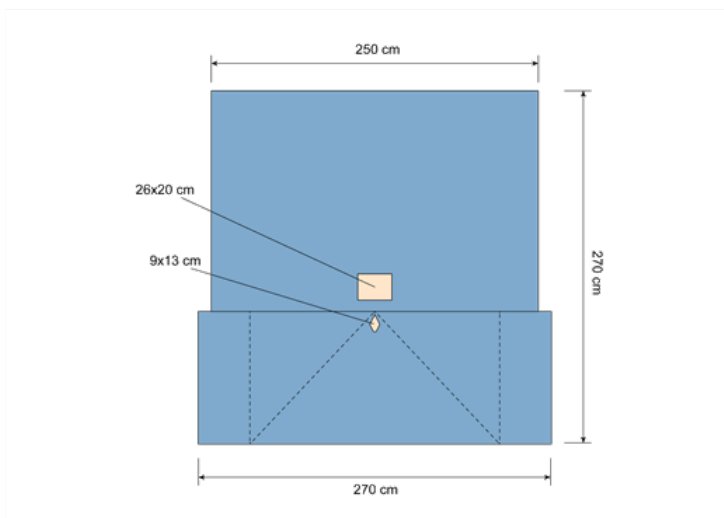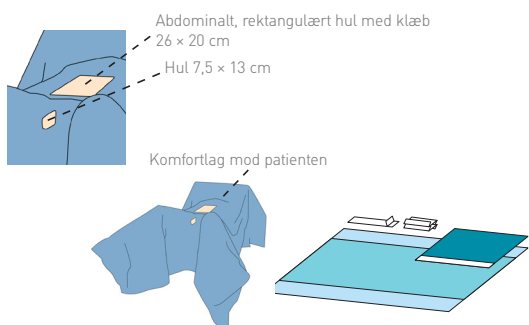

Varenr.	Beskrivelse	Str. (cm)	Pakning
696600	Gyn-/laparoskopisæt: 2 Papirhåndklæder 1 OP-tape 1 Afdækning m/klæb 1 Laparoskopiafdækning 1 Bordafdækning	18 x 25 9 x 49 75 x 75 250/270 x 270, huller 26x20 og 7,5x13 150 x 190	7/14

Alt specificeret sætindhold kan også inkluderes i Mölnlycke® procedurepakker.

Varenr.	Mölnlycke® procedurepakke komponent	Str. (cm)
956966	Gyn-/laparoskopiafdækning	250/270 x 270, huller 26x20 og 7,5x13

Læs mere på [www.molnlycke.dk](http://www.molnlycke.dk)

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 39, 3450 Allerød. Tlf.: +45 80 88 68 10. [info.dk@molnlycke.com](mailto:info.dk@molnlycke.com)  
Mölnlycke og BARRIER varemærker, navne og logoer er registreret globalt til en eller flere af virksomhederne i Mölnlycke Health Care gruppen. ©2020 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKSU0952008

Mölnlycke®