


# BARRIER<sup>®</sup>

## Gynækologisæt



- Ugennemtrængeligt for at forebygge gennemtrængning og hjælpe med at beskytte mod infektion
- Hurtig, alt-i-en drapering. Enkel at anvende for én person
- Store benposer med transparente sider
- Integreret fiksering på siderne af benposerne
- Absorberende arbejdsområde
- Klæbende kanter rundt om vaginalområdet
- Væskekontrol med integrerede opsamlingsposer
- Fri adgang til rectum

## Draperingsvejledning

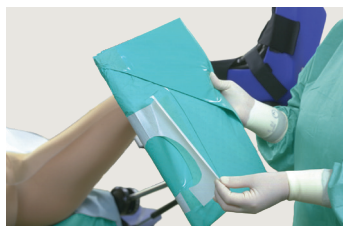

1. Fjern beskyttelsespapiret fra afdækningen efter du har placeret afdækning med fingerkant under patienten.



2. Fiksér afdækningen på patienten.



3. Fold benposerne ud og dæk et ben ad gangen.



4. Fold afdækningen ud over patienten og anæstesibøjlen.




5. Fold posen ud og fiksér det absorberende område til afdækningen.



6. Løft benene og fiksér benposerne til siden for at skabe ekstra plads for kirurgen.



7. Posen kan fikseres til et bord eller til kirurgens kittel.

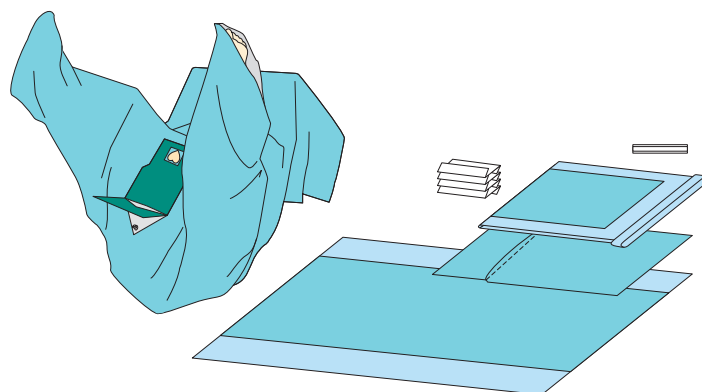

Varenr.	Beskrivelse	Str. (cm)	Pakning
925984	Gynækologisæt: 1 Slangeholder 1 Assistancebordspose 4 Papirhåndklæder 1 Afdækning med fingerkant 1 Gynækologiafdækning 1 Bordafdækning	2,5 × 30 79 × 145 18 × 25 75 × 100 200/270 × 280 150 × 190	5/10

Alt specificeret sætindhold kan også inkluderes i Mölnlycke® procedurepakker.

Varenr.	Mölnlycke® procedurepakke komponent	Str. (cm)
950022	Gynækologiafdækning	200/270 × 280

Læs mere på [www.molnlycke.dk](http://www.molnlycke.dk)

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 39, 3450 Allerød. Tlf.: +45 80 88 68 10. [info.dk@molnlycke.com](mailto:info.dk@molnlycke.com)  
Mölnlycke og BARRIER varemærker, navne og logoer er registreret globalt til en eller flere af virksomhederne i Mölnlycke Health Care gruppen. ©2020 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKSU0902007

  
**Mölnlycke®**