

BARRIER® Håndafdækning



- Tredimensionelt design giver komplet dækning
- Ugennemtrængelig for at forebygge væskegennemtrængning og hjælpe med at beskytte mod infektion
- Effektiv absorption hjælper med at opretholde et tørt arbejdsområde
- Hurtig alt-i-en drapering, enkel og effektiv at drapere for én person

Draperingsvejledning



1. Hold afdækningen i den rette position.



2. Fold afdækningen ud én gang og se på piktogrammet. Den viste hånd er patientens hånd.



3. Fold afdækningen ud i din retning, så du har en beskyttelse mellem dig og arm/hånd bordet. Derefter foldes afdækningen ud i den anden retning.



4. Fold afdækningen ud mod fodenden og derefter mod hovedet.

Varenr.	Beskrivelse	Str. [cm]	Absorptions str. [cm]	Pakning
60310	Håndafdækning: 1 Håndafdækning, hul 3,5 cm elastisk	150/370 × 280		7 / 14
60305	Håndsæt: 1 Håndafdækning, hul 3,5 cm elastisk 1 Bordafdækning	150/370 × 280 150 × 190	75 × 190	6 / 12
60306	Håndsæt: 1 Assistancebordspose 1 Håndafdækning, hul 3,5 cm elastisk 1 Bordafdækning	79 × 145 150/370 × 280 150 × 190	65 × 85 75 × 190	5 / 10

Alt specificeret sætindhold kan også inkluderes i Mölnlycke® procedurepakker.

Varenr.	Mölnlycke® procedurepakke komponent	Str. [cm]
70310	Håndafdækning, hul 3,5 cm elastisk	150/370 × 280

Læs mere på www.molnlycke.dk

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 39, 3450 Allerød. Tlf.: +45 80 88 68 10. info.dk@molnlycke.com
Mölnlycke og BARRIER varemærker, navne og logoer er registreret globalt til en eller flere af virksomhederne i Mölnlycke Health Care gruppen. ©2020 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKSU0532004