

BARRIER®

Sectioafdækning



- Integreret væskeopsamlingspose for effektiv væskehåndtering
- Tredimensionel giver komplet dækning
- Kant i blød skum langs posens kant giver stabilitet og hjælper med at kontrollere væske
- Integreret, gennemsigtig og fleksibel incisionsfilm med hul for sikker fastgørelse
- Væsketæt for at forebygge væskegennemtrængning og hjælpe med at beskytte mod infektion
- Hurtig alt-i-en drapering, enkel og effektiv at drapere for én person

Draperingsvejledning



1. Bemærk retningen på piktogrammet. Fjern beskyttelsespapiret.



2. Placér afdækningen centreret på patienten.



3. Fold mod dig selv og derefter væk fra dig selv.



4. Fold afdækningen ud mod patientens fødder og derefter helt op over hovedet.



5. Fold posen ud. Fjern crepe papiret og sørg for, at filmen med klæb sidder godt fast på patienten.



6. Draperingen er nu komplet.

Varenr.	Beskrivelse	Pakning
694135	Sectiosæt med hul i incisionsfilmen 1 Assistancebordspose 79 × 145 cm, 65 × 85 cm absorberende område 4 Papirhåndklæder 18 × 25 cm 1 OP-tape 9 × 49 cm 1 Babylagen 90 × 120 cm 1 Sectioafdækning 175/250 × 300 cm, incisionsfilm 38 × 32 cm, 18 × 16 cm hul i incisionsfilm 1 Bordafdækning 150 × 190 cm, 75 × 190 cm absorberende område	4/8

Alt specificeret sætindhold kan også inkluderes i Mölnlycke® procedurepakker.

Varenr.	Mölnlycke® procedurepakke komponent
969673	Sectioafdækning, 175/250 × 300 cm, incisionsfilm 38 × 32 cm, hul 18 × 16 cm, indpakket

Læs mere på www.molnlycke.dk

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 39, 3450 Allerød. Tlf.: 80 88 68 10. info.dk@molnlycke.com
Mölnlycke og BARRIER varemærker, navne og logoer er registreret globalt til en eller flere af virksomhederne i Mölnlycke Health Care gruppen. © 2020 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKSU0412004


Mölnlycke®