

# Handskepåtagning for Biogel® Indicator® Systemer

'ÅBEN påtagning'

Ifør dig den sterile kittel og åbn yder-og inderemballagen som anbefalet<sup>1</sup>



1. Tag den første farvede handske ud af inderemballagen med din ikke-dominante hånd. Placer tommel- og pegefingern på din anden hånd på folden af det ombukkede handskeskaft på højde med handskens håndflade og træk handsken over hånden.



2. Behold handskeskaftet ombukket.



3. Tag den anden farvede handske ud af emballagen ved at tage fat med dine behandskede fingre under det ombukkede handskeskaft. Med strakt arm og let bøjet albue, føres den ubehandskede hånd ind i handsken.



4. Træk handsken op over kittlens vævede manchete ved at vrikke armen frem og tilbage med små bevægelser.



5. Træk handsken helt på plads. Sørg for, at handsken dækker kittlens manchete med en margin på ca. 10 cm. Følg samme procedure for den anden handske.



6. Åbn inderemballagen med de halmfarvede yderhandsker. Før fingrene fra den ene behandskede hånd ind i den første yderhandske, mens handsken strækkes for at sikre optimal komfort og pasform. Træk handsken helt på plads og gentag proceduren med den anden yderhandske.



7. Sørg for, at yderhandsken er trukket godt op over inderhandsken (ca. 2,5 cm) for at undgå, at den ruller eller glider ned. Tryk kanten af handskens manchete godt ned mod kittlen, for at anti-rulle båndet i handsken sidder fast på kittlen.



8. Når handskepåtagning og evt. justeringer er afsluttet, skal du strække dine arme for at sikre dig, at handskerne sidder rigtigt.

Udskiftning af kontamineret/perforeret handske under operation.



9. Hvis der opstår handskepunktur, hvor der er væske tilstede, vil der forekomme en mørk plet på yderhandsken på det sted, hvor punkturen optræder.



10. Fjern yderhandsken ved at trække handskeskaftet ned over hånden, så handsken vender vrangen udad. Smid handsken væk.



11. Kontrollér inderhandsken for punktur. Er der punktur, tages handsken af og udskiftes i henhold til de lokale forskrifter. Ellers tørres handsken af med en steril serviet.

Åbn en ny pakke med den rette type Biogel yderhandsker for at sikre, at farveindikationssystemet virker efter hensigten. Tag den nye yderhandske på og sørg for, at skaftet på den er trukket godt op over inderhandsken (ca. 2,5 cm) for at undgå, at den ruller eller glider ned.

Besøg vores hjemmeside for videovejledning til påtagning af kittler og operationshandsker.

Referencer: 1 Folin A.Udpakning af Indicator-dobbelthandskesystem. En Sikker Hånd 2/2009. Mölnlycke Health Care AB.

Læs mere på [www.molnlycke.dk](http://www.molnlycke.dk)

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 39, 3450 Allerød. Tlf.: 48 168 268. [info.dk@molnlycke.com](mailto:info.dk@molnlycke.com)  
Mölnlycke og Biogel varemærker, navne og logoer er registreret globalt til en eller flere af virksomhederne i Mölnlycke Health Care gruppen. © 2019 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKSU0011901

  
**Mölnlycke®**