

Handskepåtagnig for Biogel® Indicator® Systemer

'LUKKET' påtagning med manchetterne i hænderne'

Ifør dig den sterile kittel og åbn yder- og inderemballagen som anbefalet¹



1. Stræk ikke hænderne gennem ærmernes manchetter. Hold manchetterne i hænderne som vist på billedet.



2. Yderemballagen åbnes nu af sygeplejersken med gulvfunktion. Tag inderemballagen med hænderne helt dækket af kittlens ærmer.



3. Læg inderemballagen på det sterile underlag, så handskens fingre peger mod dig. Åbn inderemballagen (de farvede handsker), mens du sørger for at holde hænderne helt dækket af kittlens ærmer. Tag den første handske med din dominerende hånd (den højre handske med din højre hånd, eller den venstre handske med din venstre hånd).



4. Vip handsken forsigtigt bagover, så den hviler på din venstre eller højre underarm. Handskens tommelfinger er nu ud for din egen tommelfinger.



5. Brug din anden hånd, som stadig er inde i kittelærmet, og træk kanten af handsken over din håndryg.



6. Træk handsken op over kittlens manchete ved at vrikke fingrene frem og tilbage med små bevægelser.



7. Handsken er nu helt på plads. Sørg for, at handsken altid dækker kittlens vævede manchete fuldstændigt. Tag den anden handske op med den ubehandskede hånd, på samme måde som ved første handske.



8. Brug din behandskede hånd til at trække kanten af handsken over bagsiden af din anden hånd. Vrik med dine fingre og træk handsken op over din hånd som før, indtil den er helt på plads.



9. Tag yderhandskerne på. Sørg for at yderhandsken er trukket godt op over inderhandsken (ca. 2,5 cm) for at undgå, at den ruller eller glider ned. Tryk kanten af handskens manchete godt ned mod kittlen, for at anti-rulle båndet i handsken sidder fast på kittlen.



10. Når handskepåtagnig og evt. justeringer er afsluttet, skal du strække dine arme for at sikre dig, at handskerne sidder rigtigt.

Udskiftning af kontamineret/perforeret handske under operation.



11. Hvis der opstår handskepunkter, hvor der er væske tilstede, vil der forekomme en mørk plet på yderhandsken på det sted, hvor punkturen optræder.



12. Fjern yderhandsken ved at trække handskeskaffet ned over hånden, så handsken vender vrangen udad. Smid handsken væk.



13. Kontrollér inderhandsken for punkter. Er der punkter, tages handsken af og udskiftes i henhold til de lokale forskrifter. Ellers tørres handsken af med en steril serviet.

Åbn en ny pakke med den rette type Biogel yderhandsker for at sikre, at farveindikations-systemet virker efter hensigten. Tag den nye yderhandske på og sørg for, at skaffet på den er trukket godt op over inderhandsken (ca. 2,5 cm) for at undgå, at den ruller eller glider ned.

Besøg vores hjemmeside for videovejledning til påtagning af kittel og operationshandsker.

Referencer: 1 Folin A.Udpakning af Indicator-dobbelthandskesystem. En Sikker Hånd 2/2009. Mölnlycke Health Care AB.

Læs mere på www.molnlycke.dk

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 39, 3450 Allerød. Tlf.: 48 168 268. info.dk@molnlycke.com
Mölnlycke og Biogel varemærker, navne og logoer er registreret globalt til en eller flere af virksomhederne i Mölnlycke Health Care gruppen. © 2018 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKSU361812


Mölnlycke®