

# Handskepåtagning for Biogel® Indicator® Systemer

'LUKKET' påtagning med manchetterne over hænderne'

Ifør dig den sterile kittel og åbn yder- og inderemballagen som anbefalet<sup>1</sup>.



1. Stræk ikke hænderne gennem ærmernes manchetter. Manchetterne skal være løse som vist på billedet.



2. Yderemballagen åbnes af sygeplejersken med gulvfunktion. Tag inderemballagen med kittlen, mens hænderne bliver i manchetterne.



3. Læg inderemballagen på det sterile underlag, så handskens fingre peger mod dig. Åbn inderemballagen (de farvede handske), mens du hele tiden sørger for at holde hænderne inde i kittlens ærmer. Tag den første handske med din dominerende hånd (den højre handske med din højre hånd eller den venstre handske med din venstre hånd).



4. Vip handsken forsigtigt bagover, så den hviler på din venstre eller højre underarm. Handskens tommelfinger er nu ud for din egen tommelfinger.



5. Brug din anden hånd, som stadig er inde i kittelærmet, og træk kanten af handsken over din håndryg.



6. Træk handsken op over kittlens manchete ved at vrikke fingrene frem og tilbage med små bevægelser.



7. Handsken er nu helt på plads. Sørg for, at handsken altid dækker kittlens vævede manchete fuldstændigt. Tag den anden handske op med den ubehandskede hånd, på samme måde som ved den første handske.



8. Brug din behandskede hånd til at trække kanten af handsken over bagsiden af din anden hånd. Vrik med dine fingre og træk handsken op over din hånd som før, indtil den er helt på plads.



9. Tag yderhandskerne på. Sørg for at yderhandsken er trukket godt op over inderhandsken (ca. 2,5 cm) for at undgå, at den ruller eller glider ned. Tryk kanten af handskens manchete godt ned mod kittlen, for at anti-rulle båndet i handsken sidder fast på kittlen.



10. Når handskepåtagning og evt. justeringer er afsluttet, skal du strække dine arme for at sikre dig, at handskerne sidder rigtigt.

Udskiftning af kontamineret/perforeret handske under operation.



11. Hvis der opstår handskepunktur, hvor der er væske tilstede, vil der forekomme en mørk plet på yderhandsken på det sted, hvor punkturen optræder.



12. Fjern yderhandsken ved at trække handskeskaftet ned over hånden, så handsken vender vrangen udad. Smid handsken væk.



13. Kontrollér inderhandsken for punktur. Er der punktur, tages handsken af og udskiftes i henhold til de lokale forskrifter. Ellers tørres handsken af med en steril serviet.

Åbn en ny pakke med den rette type Biogel yderhandsker for at sikre, at farveindikationssystemet virker efter hensigten. Tag den nye yderhandske på og sørg for, at skaftet på den er trukket godt op over inderhandsken (ca. 2,5 cm) for at undgå, at den ruller eller glider ned.

Besøg vores hjemmeside for videovejledning til påtagning af kittler og operationshandsker.

Referencer: 1 Folin A.Udpakning af Indicator-dobbelthandskesystem. En Sikker Hånd 2/2009. Mölnlycke Health Care AB.

Læs mere på [www.molnlycke.dk](http://www.molnlycke.dk)

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 39, 3450 Allerød. Tlf.: 48 168 268. [info.dk@molnlycke.com](mailto:info.dk@molnlycke.com)  
Mölnlycke og Biogel varemærker, navne og logoer er registreret globalt til en eller flere af virksomhederne i Mölnlycke Health Care gruppen. © 2019 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKSU0021901

  
**Mölnlycke®**