

BARRIER® dispenser til maskeæsker



- Hjælper med at holde orden på maskerne
- Maskerne er altid på det rette sted
- Maskerne bliver beskyttet mod nedfaldne partikler
- Nem at rengøre og genopfylde
- Hygiejnisk
- Omkostningseffektiv

Monteringsvejledning – BARRIER® dispenser til maskeæsker



Placer dispenseren på væggen og fastgør den med skrueerne.



Åben forsigtigt det øverste låg og fjern derefter det perforerede papstykke.



Vend æsken på hovedet.



Placer æsken med åbningen nedad som anvist på billedet. Anbring dispenseren på indersiden af æsken.



Træk æsken ned over dispenseren.



Dispenseren er nu klar til brug.

Ikke alle vores æsker passer på dispenseren - er du i tvivl, kan du altid kontakte os.

Læs mere på www.molnlycke.dk

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 33, 3450 Allerød. Tlf.: 48 168 268. info.dk@molnlycke.com
Mölnlycke og BARRIER varemærker, navne og logoer er registreret globalt til en eller flere af virksomhederne i Mölnlycke Health Care gruppen. © 2017 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKSU0691710



Mölnlycke®