



## Påtagningsvejledning: Maske med øreelastik

- A. Tag fingrene gennem øreelastikkerne. Næseklemmen skal være øverst. Placér masken over din næse og mund
- B. Placér elastikkerne omkring ørerne. Træk i masken fra oven og for neden for at folde den helt ud. Dette vil give maksimal dækning af ansigtet og minimere antallet af lag, du skal ånde gennem
- C. Form næseklemmen rundt om næsen for at minimere luftlækage
- D. Ører og hår skal være dækket af en passende hue for at minimere spredningen af hår og andre partikler. Hvis der er risiko for væskestænk, skal du anvende en stænkresistent medicinsk ansigtsmaske. Skift maske, når den er kontamineret og mellem hver operation
- E. Smid masken væk efter brug

Læs mere på [www.molnlycke.dk](http://www.molnlycke.dk)

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 39, 3450 Allerød. Tlf.: +45 80 88 68 10. [info.dk@molnlycke.com](mailto:info.dk@molnlycke.com)  
 Mölnlycke varemærke, navn og logo er registreret globalt til en eller flere af virksomhederne i Mölnlycke Health Care gruppen. ©2020 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. All rights reserved. DKSU0462004

**Mölnlycke**<sup>®</sup>