
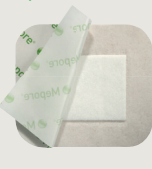
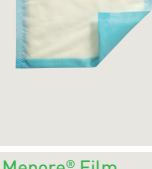
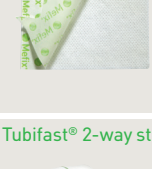



Sårbehandling 2022



- Vask først hænderne, vask derefter såret med lunkent vand fra vandhanen for at fjerne skidt og snavs.
- Tør huden forsigtigt og læg plastret på såret.
- Kontakt lægen hvis såret væsker mere eller bliver mere rødt og smertefuldt. Dette kan være tegn på infektion.

Sårprodukter med traditionel klæb – til ukomplicerede sår

Produkt	Varenr.	Str.	Stk./pakning	Anvendelsesområde	Egenskaber
 <p>Mepore® Selvklæbende absorberende plaster</p>	222740 223218 223219 223220 223221 223223	6 × 7 cm 9 × 10 cm 9 × 15 cm 9 × 20 cm 9 × 25 cm 9 × 35 cm	5 (OTC) 5 (OTC) 5 (OTC) 5 30 30	<ul style="list-style-type: none"> • Tørre til let væskende sår • Kirurgiske sår • Rifter • Mindre hudafskrabninger 	<ul style="list-style-type: none"> • Åndbar • Absorberende
 <p>Mepore® Pro Brusetæt, selvklæbende absorberende plaster</p>	222741 223224 223225 223226 223158 223227	6 × 7 cm 9 × 10 cm 9 × 15 cm 9 × 20 cm 9 × 25 cm 9 × 30 cm	5 (OTC) 5 (OTC) 5 (OTC) 10 30 30	<ul style="list-style-type: none"> • Let til moderat væskende sår • Kirurgiske sår • Rifter • Hudafskrabninger 	<ul style="list-style-type: none"> • Åndbar • Absorberende • Virus- og bakteriebarriere • Brusetæt
 <p>Mepore® Film & Pad Selvklæbende transparent film med pude</p>	209804 209806 210468 209808 209809 220423	4 × 5 cm 5 × 7 cm 9 × 10 cm 9 × 15 cm 9 × 20 cm 9 × 30 cm	5 5 5 5 5 25	<ul style="list-style-type: none"> • Let til moderat væskende sår • Kirurgiske sår • Rifter • Hudafskrabninger 	<ul style="list-style-type: none"> • Åndbar • Absorberende • Blid og sikker fiksering • Virus- og bakteriebarriere • Brusetæt
 <p>Mesoft® Kompres Nonwoven</p>	Sterile, 40 g 209811 209812 209813 Usterile, 30 g 208965 209035 208739	5 × 5 cm 7,5 × 7,5 cm 10 × 10 cm 5 × 5 cm 7,5 × 7,5 cm 10 × 10 cm	20 20 20 100 100 100	<ul style="list-style-type: none"> • Absorption • Rensning af sår • Ideel til øjenomgivelserne 	<ul style="list-style-type: none"> • 70% viscose/30% polyester • Høj absorptionskapacitet • Blød • Fngfri
 <p>Mesorb® Absorberende bandage med lækagebarriere ikke hæftende</p>	224173	10 × 10 cm	10	<ul style="list-style-type: none"> • Kan anvendes direkte på såret eller som sekundær bandage 	<ul style="list-style-type: none"> • Åndbar • Højabsorberende bandage • Væskeafvisende overflade • Kan fikseres med f.eks. Tubifast 2-Way Stretch
 <p>Mepore® Film Selvklæbende transparent film</p>	209800 209801 209802	6 × 7 cm 10 × 12 cm 10 × 25 cm	10 10 10	<ul style="list-style-type: none"> • Primær bandage til rene sår • Sekundær fikseringsbandage 	<ul style="list-style-type: none"> • Åndbar • Blid og sikker fiksering • Virus- og bakteriebarriere • Transparent
 <p>Mefix® Fikseringsplaster</p>	2,5 m ruller 220117 220136 10 m ruller 220215 220216	5 cm bred 10 cm bred 2,5 cm bred 10 cm bred	1 1 1 1	<ul style="list-style-type: none"> • Ideel til fiksering 	<ul style="list-style-type: none"> • Åndbar • Sikker fiksering • Blød, elastisk
 <p>Tubifast® 2-way stretch Elastisk tubebandage der kan strækkes i begge retninger</p>	211856 211857 211858 211859 210536	3,5 cm × 1 m 5 cm × 1 m 7,5 cm × 1 m 10,75 cm × 1 m 20 cm × 1 m	1 1 1 1 1	<ul style="list-style-type: none"> • Til bandagefiksering • Kan dække forskellige kroppsdele uanset størrelse eller facon • Kan klippes efter behov <p>Materiale: Viskose, elastan, polyamid</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 2-Way Stretch tube facon holder bandagen sikkert på plads • Giver bevægelsesfrihed • Hver størrelse er markeret med forskellig farve • Kan vaskes i hånden







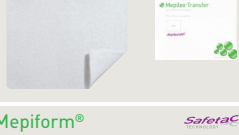

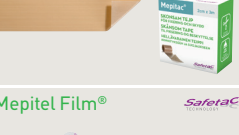


Vores bandager er angivet med dråber, som viser mængden af væske, de kan håndtere. OTC = apotekspakninger

👉 Let - og ikke væskende sår


















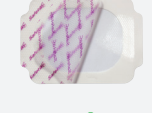

👉👉 Let - til moderat væskende sår

👉👉👉 Moderat til kraftigt væskende sår

Avancerede plastre med Safetac teknologi – til komplicerede sår

Produkt	Varenr.	Str.	Stk./pakning	Anvendelsesområde	Egenskaber
Mepilex® Lite 	206256 205719	6 × 8,5 cm 10 × 10 cm	5 5	<ul style="list-style-type: none"> • Let- og ikke væskende sår • Diabetiske fodsår • Brandsår/hudafskrabning • Hudreaktioner ved strålebehandling • Skrøbelig hud 	<ul style="list-style-type: none"> • Tynd, fleksibel, formbar og åndbar • Selvklæbende • Kræver fiksering med f.eks. Tubifast, Mepitel Film, Mepitac • Kan klippes til efter behov
Mepilex® Border Lite 	212848 212849 216625 222468 223727	4 × 5 cm 5 × 12,5 cm 7,5 × 7,5 cm 7,5 × 7,5 cm 10 × 10 cm	4 (OTC) 3 (OTC) 3 (OTC) 5 5	<ul style="list-style-type: none"> • Let- og ikke væskende sår • Ben- og fodsår • Fingerskader • Hudafskrabning 	<ul style="list-style-type: none"> • Tyndt selvklæbende alt-i-et plaster • Åndbar • Virus- og bakteriebarriere • Flexibel • Brusetæt
Mepilex® 	212853 224385 224411 224412	10 × 10 cm 10 × 10 cm 15 × 15 cm 10 × 20 cm	2 (OTC) 5 5 5	<ul style="list-style-type: none"> • Let til moderat væskende sår • Ben- og fodsår • Brandsår • Snitsår/rifter 	<ul style="list-style-type: none"> • Flexibel, formbar og åndbar • Selvklæbende • Kræver fiksering med f.eks. Tubifast, Mefix eller Mepitac • Kan klippes til efter behov
Mepilex® Border 	212854 207370 212855 207484 204351 216327 214541 214542	7,5 × 7,5 cm 7,5 × 7,5 cm 10 × 10 cm 10 × 10 cm 15 × 15 cm 10 × 20 cm 10x25cm 10x30cm	3 (OTC) 5 2 (OTC) 5 5 5 5 5	<ul style="list-style-type: none"> • Moderat til kraftigt væskende sår • Tryksår • Ben-sår og fodsår • Operationssår • Snitsår/rifter 	<ul style="list-style-type: none"> • Selvklæbende alt-i-et plaster • Åndbar • Virus- og bakteriebarriere • Smidig • Brusetæt
Mepilex® Border Flex 	224651	7,5 × 7,5 cm	5	<ul style="list-style-type: none"> • Moderat til kraftigt væskende sår • Tryksår • Ben-sår og fodsår • Operationssår • Snitsår/rifter 	<ul style="list-style-type: none"> • Ekstra fleksibel • Absorberende • Blid og sikker fiksering • Virus- og bakteriebarriere • Brusetæt
Mepitel® One 	212850 222739	5 × 7,5 cm 7,5 × 10 cm	2 (OTC) 10	<ul style="list-style-type: none"> • Ikke væskende til kraftigt væskende sår • Brandsår/hudafskrabning 	<ul style="list-style-type: none"> • Kan ligge på såret i op til 14 dage • Kræver sekundær forbindelse (Mesoft/Mesorb) som fikseres (Tubifast/Mefix/Mepitac) • Forhindrer at den sekundære forbindelse hænger i såret • Kan klippes til efter behov
Mepilex® Transfer 	211834	7,5x8,5	5	<ul style="list-style-type: none"> • Ikke væskende til kraftigt væskende sår 	<ul style="list-style-type: none"> • Åndbar • Højabsorberende bandage • Væskeafvisende overflade • Kan fikseres med f.eks. Tubifast 2-Way Stretch
Mepiform® 	215174 212851 218857	4 × 30 cm 5 × 7,5 cm 10 × 18 cm	5 2 (OTC) 5	<ul style="list-style-type: none"> • Arbejdning • Hypertrofiske ar (forhøjede og synlige ar) • Keloider (arforandringer) 	<ul style="list-style-type: none"> • Tilpasser sig efter kropskonturerne • Tynd og diskret • Kan klippes til efter behov • Solfaktor 5
Mepitac® 	216621 205803	2 cm × 3 m 4 cm × 1,5 m	1 (OTC) 1	<ul style="list-style-type: none"> • Nænsom fiksering (fx. dræn/slanger) • Fingerrevner 	<ul style="list-style-type: none"> • Ideel ved sart og skrøbelig hud • Tilpasser sig efter kropskonturerne
Mepitel Film® 	223276 223277	6 × 7 cm 10 × 12 cm	10 10	<ul style="list-style-type: none"> • Moderat til kraftigt væskende sår • Tryksår • Ben-sår og fodsår • Operationssår • Snitsår/rifter 	<ul style="list-style-type: none"> • Selvklæbende alt-i-et plaster • Åndbar • Virus- og bakteriebarriere • Smidig • Brusetæt
Mepilex® Ag 	209803	10 × 10 cm	5	<ul style="list-style-type: none"> • Let til moderat væskende sår • Anvendes ved tegn på øget bakterievækst • Ben- og fod sår • Brandsår 	<ul style="list-style-type: none"> • Bekæmper bakterier • Hurtig og vedvarende antimikrobiel virkning • Selvklæbende • Kræver fiksering med f.eks. Tubifast, Mepitel Film eller Mepitac

Vælg det rigtige avancerede plaster med Safetac® teknologi

Produkter	Pakning	Skrøbelig hud/ Hudafkrabning	Brandsår	Væskende sår	Operationssår	Ar
 Mepilex® Border Lite		✓	✓	✓	✓	
 Mepilex® Border		✓	✓	✓	✓	
 Mepilex® Border Flex		✓	✓	✓	✓	
 Mepilex® Lite		✓				
 Mepilex®		✓		✓		
 Mepilex® Transfer				✓		
 Mepitel® One		✓	✓	✓	✓	
 Mepiform®						✓
 Mepitac®		✓				
 Mepitel® Film		✓				

Safetac® teknologi. Det er resultatet, der tæller

Vores bandager med Safetac® er designet til at spare patienten for unødvendig smerte under helingsprocessen og de er bevist at kunne hjælpe med at optimere sårhelingsprocessen. Vi har et væld af evidens, der understøtter de kliniske og sundhedsøkonomiske fordele ved bandager med Safetac, herunder Mepilex®, Mepitel®, Mepiform® og Mepitac®. Til dato har disse bandager hjulpet millioner af patienter verden over.

Læs mere på www.molnlycke.dk

Molnlycke Health Care ApS, Gydevang 39, 3450 Allerød. Tlf.: + 45 80 886 810 , info.dk@molnlycke.com
Molnlyckes varemærker, Safetac, Mepilex, Mepiform, Mepitac, Mepitel, Mepore, Mesoft, Mesorb, Mefix, Tubifast 2-Way Stretch
navne og logoer er registreret globalt til en eller flere af virksomhederne i Molnlycke Health Care gruppen. ©2022 Feb 2022