

Melgisorb® Ag

Højabsorberende, antimikrobiel alginatbandage



Sølvholdigt alginat


- Har en vedvarende antimikrobiel effekt
- In vitro forsøg viser antimikrobiel virkning fra 4 timer op til 14 dage

Alginat med CMC fibre


- Velegnet til kraftigt væskende sår
- Udviklet til overfladiske og dybe sår
- Muliggør fjernelse i ét stykke

- God absorption til kraftigt væskende og dybe sår
- Har en vedvarende antimikrobiel effekt
- Høj fiberstyrke som muliggør fjernelse af produktet i ét stykke


Sådan anvendes Melgisorb® Ag

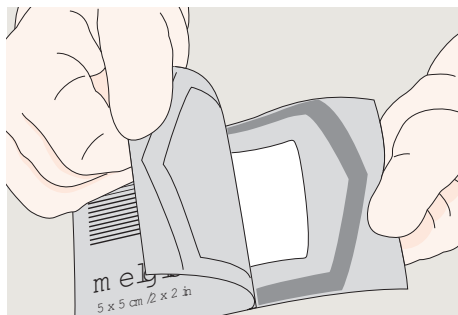

1. Debridér og skyl såret og den omkringliggende hud i overensstemmelse med standardprocedure. Vælg Melgisorb Ag i en størrelse, der er lidt større end såret. Klip eller fold bandagen, så den passer til såret.

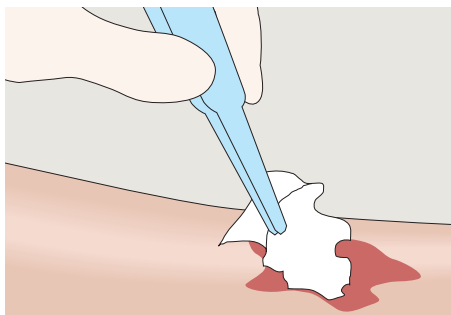

2. Udfyld løst dybe sår, vær opmærksom på at bandagen ikke går ud over sårkanterne. Læg bandagen direkte på såret.

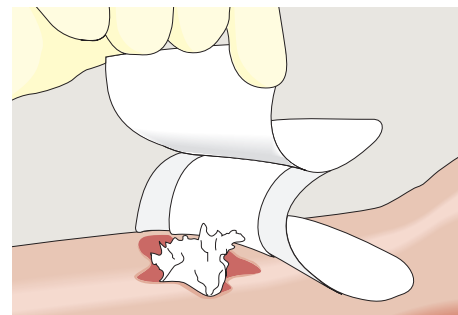

3. Dæk og fastgør Melgisorb Ag med en sekundær bandage.

Anvendelsesområder

Melgisorb Ag er udviklet til behandling af moderat til kraftigt væskende sår som:

- post-operative kirurgiske sår
- traumesår (hudlæsioner, akutte sår eller incisioner)
- bensår
- tryksår
- diabetiske sår
- transplantat- og donorsteder
- delhudsforbrændinger

Dette produkt kan også anvendes under kompressionsbandager. Da Melgisorb Ag indeholder alginat, kan produktet være med til at kontrollere mindre blødninger i overfladiske sår. Melgisorb Ag kan anvendes ved behandling af inficerede sår eller sår, hvor der er øget risiko for infektion, under professionel overvågning. Melgisorb Ag anvendes udelukkende til udvortes brug.

Bemærk

Melgisorb Ag kan blive siddende på i op til 7 dage. Skift af bandagen afhænger af sårets tilstand og eksudatniveau. I starten kan det være nødvendigt at skifte bandagen efter et døgn. Hvis såret virker tørt, fugt bandagen med almindeligt vand/sterilt saltvand inden fjernelsen. Fjern forsigtigt bandagen fra såret. Skyl såret i overensstemmelse med standardproceduren, før en ny bandage appliceres.

Kontraindikationer

Melgisorb Ag bør ikke anvendes ved følgende indikationer:

- til personer med kendt overfølsomhed over for alginater eller sølv
- for at kontrollere kraftig blødning
- til direkte applicering på tørre eller let væskende sår

For detaljeret information, se brugsanvisningen



Sortiment (sterilt pakket)

Varenr.	Str. cm	Stk./inderkrt.	Stk./trp.krt.
256055	5 x 5	10	100
256105	10 x 10	10	100
256155	15 x 15	10	100
256205	20 x 30	5	50
256605	3 x 44	10	100

Læs mere på www.molnlycke.dk

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 39, 3450 Allerød. Tlf.: +45 80 88 68 10. info.dk@molnlycke.com Mölnlycke og Melgisorb varemærker, navne og logoer er registreret globalt til en eller flere af virksomhederne i Mölnlycke Health Care Gruppen.
©2021 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKWC0682012


Mölnlycke®