


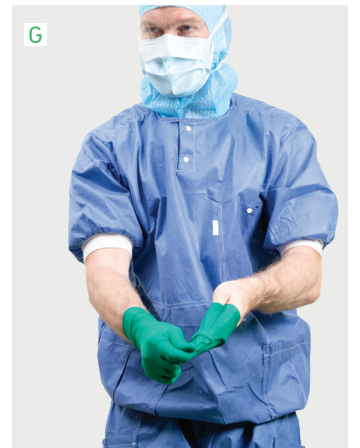

Riisumisopas

Likaisen leikkaustakin ja käsineiden riisuminen

- A. Aloita riisumalla ensimmäinen likainen päällyskäsine kääntämällä se nurinpäin.
- B. Riisu myös toinen päällyskäsine. Hävitä käsineet.
- C. Tartu leikkaustakkiin vyötäröltä.
- D. Vedä takki pois päin kehostasi katkaistaksesi kiinnitysnauhat. Mikäli leikkaustakki on monikäyttöinen avaa kiinnitys takaa.
- E. Vedä leikkaustakin kaulus ja hihat eteenpäin ja ulos käsineistä koskettamalla käsineillä vain takin ulkopintaa.
- F. Pidä kädet ja leikkaustakki irti kehosta kääntäessäsi leikkaustakki ympäri mytäksi. Hävitä takki.
- G. Poista ensimmäinen aluskäsine vetämällä käsineen suusta ja kääntämällä se nurinpäin.
- H. Poista toinen aluskäsine koskettamalla vain käsineen sisäosaa.
- I. Lopuksi hävitä käsineet ja desinfioi kätesi.



Lue lisää www.molnlycke.fi/biogel

Mölnlycke Health Care Oy, Valimotie 21, 00380 Helsinki. Puhelin 0201 622 300.
Mölnlycke Health Care- ja Bioigel®-tavaramerkit, nimet ja logotyypit on kansainvälisesti rekisteröityjä vähintään yhdelle Mölnlycke Health Care -yhtiölle. ©2020. Mölnlycke Health Care AB. Kaikki oikeudet pidätetään. FISU1252006


Mölnlycke®