



# Riisumisopas

Likaisen suojatakin ja tutkimuskäsineiden riisuminen

- A. Tartu suojatakkiin vyötäröltä
- B. Vedä takki pois päin kehostasi katkaistaksesi kiinnitysnauhat. Mikäli suojatakki on monikäyttöinen avaa kiinnitys takaa.
- C. Vedä takin kaulus ja hihat eteenpäin ja ulos käsineistä koskettamalla käsineillä vain takin ulkopintaa.
- D. Pidä kädet ja leikkaustakki irti kehosta kääntäessäsi takki ympäri mytyksi. Hävitä takki.
- E. Poista ensimmäinen tutkimuskäsine vetämällä käsineen suusta ja kääntämällä se nurinpäin.
- F. Poista toinen käsine koskettamalla vain käsineen sisäosaa.
- G. Lopuksi hävitä käsineet ja desinfioi kätesi.



Lue lisää [www.molnlycke.fi/biogel](http://www.molnlycke.fi/biogel)

Mölnlycke Health Care Oy, Valimotie 21, 00380 Helsinki. Puhelin 0201 622 300.  
Mölnlycke Health Care- ja Biogel®-tavaramerkit, nimet ja logotyypit on kansainvälisesti rekisteröityjä vähintään yhdelle Mölnlycke Health Care -yhtiölle. ©2020. Mölnlycke Health Care AB. Kaikki oikeudet pidätetään. FISU1332008

  
**Mölnlycke®**