


Mepitac®

Varma ja hellävarainen Safetac-kiinnitys hauraalle tai herkälle iholle

Safetac® kerros


- Ei aiheuta vauriota iholle poistettaessa¹

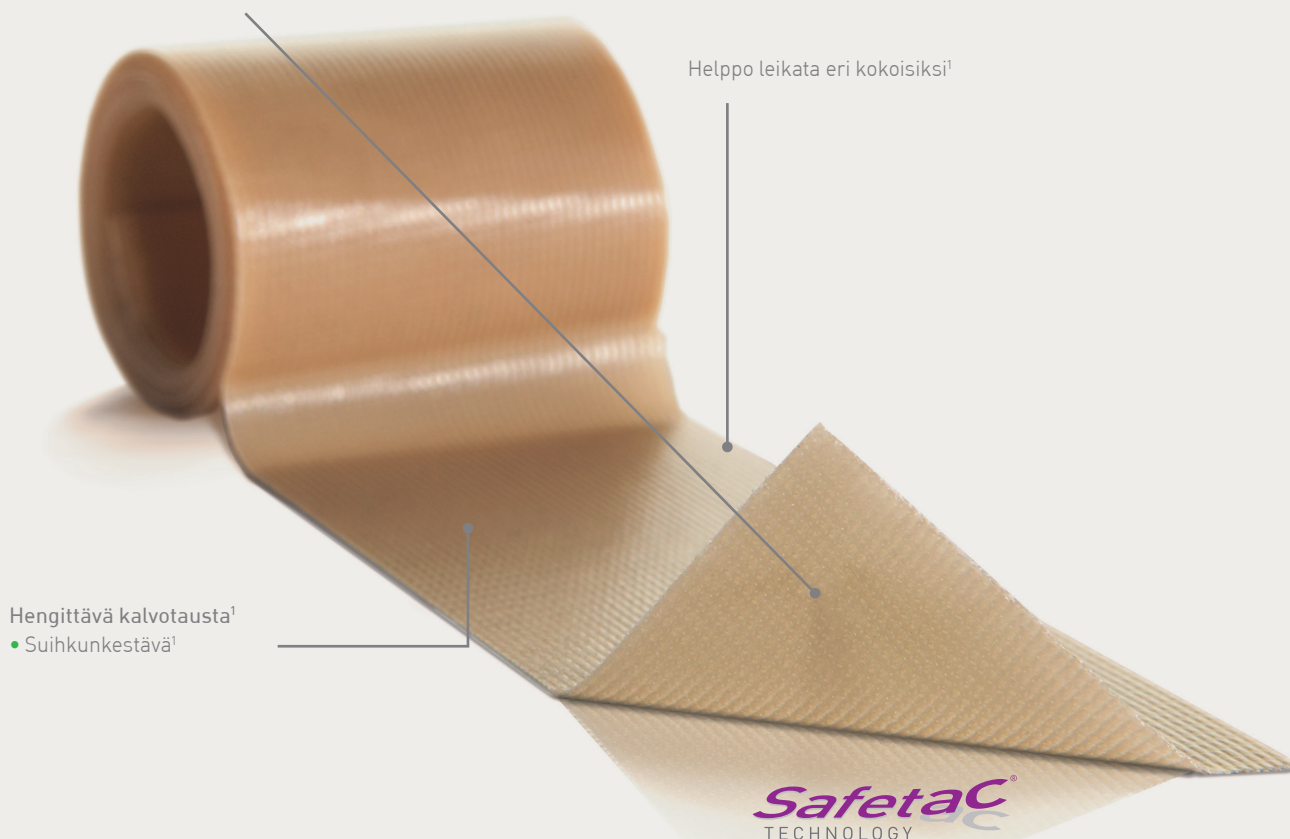

Safetac® teknologia. Vähemmän stressiä. Vähemmän kipua.

Safetac-tekniikan sidokset ovat suunniteltua ainutlaatuisia ja niiden on tutkitusti todettu vähentävän kipua ja vaurioita, tukien näin kehon luonnollista paranemisprosessia. Sulkee haavan reuna-alueet varmistaen, etteivät haavanesteet leviä ympäröivälle iholle.

Lue lisää www.molnlycke.fi/tietopankki/safetac-teknologia/

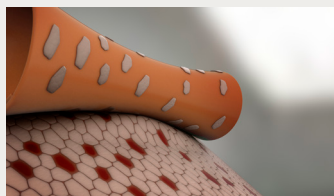

Iho kuoriutuu perinteisiä akrylaattikiinnitteisiä sidoksia poistettaessa




Ihon kuoriutumista ei tapahdu Safetac-kiinnitteisillä sidoksilla


- Vähentää kipua sidosten vaihdossa¹
- Suojaa lääkinnällisten laitteiden alla esim happiviiksien alla¹

- Mukautuu hyvin kehon muotoihin¹


Miten Mepitacia käytetään?

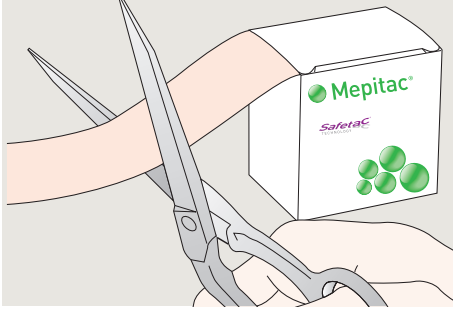

1. Varmista että iho on puhdas ja kuiva ja ettei siinä ole mitään voiteita yms. Leikkaa teippi saksilla halutun pituiseksi.

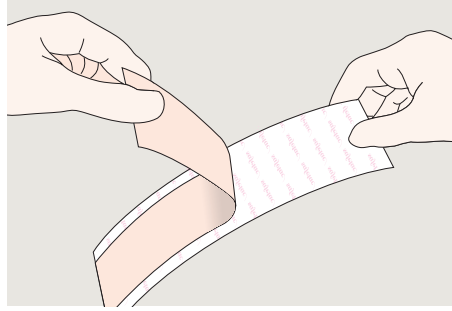

2. Irroita suojakalvo.

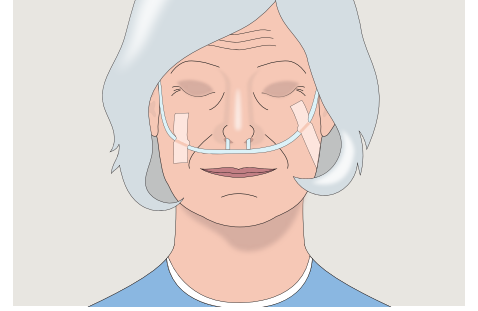

3. Aseta Mepitac paikoilleen venyttämättä sitä. Mepitacia voidaan nostaa ja asettaa uudelleen paikoilleen, jos tarkistus tai uudelleenasettelu ovat tarpeellisia.

Miten Mepitac toimii

Mepitac on helppokäyttöinen ja tarjoaa apua sidosten kaltaisten lääketieteellisten välineiden kiinnittämiseen. Mepitac on ihanteellinen kiinnitysratkaisu potilaille, joilla on hauras ja herkkä iho¹.

Mepitac voidaan nostaa iholta ja asettaa uudelleen, jos tarkistus on tarpeellista¹.

Mepitacin edut

- Ei jätä jäännöksiä iholle¹
- Mukautuu hyvin kehon muotoihin¹
- Ei vahingoita ihoa poistettaessa¹
- Suihkunkestävä¹
- Hengittävä¹



Käyttöalueet

Mepitac on suunniteltu kiinnittämään sairaalavälineitä kutendreenejä, katetreja, putkia, elektrodeja, IV kanyyleja ja sidoksia. Lisäksi Mepitac suojaa hellävaraisesti ihoa esim. putkien alla.



Mepitac valikoima

Tuotenumero	Koko (cm)	Kpl/osastopakkaus	Kpl/kuljetuspakkaus
298300	2 x 300	1	12
298400	4 x 150	1	12

VIITTEET: 1. Mölnlycke Health Care. Data on file.

Lisätietoa www.molnlycke.fi

Mölnlycke Health Care Oy, Valimotie 21, 3krs. 00380 Helsinki. Puh +358 (0)201 622 300. Mölnlycke, Mepitac ja Safetac tuotemerkit, nimet ja logot ovat yhdelle tai useammalle Mölnlycke Health Care Group -konsernin yritykselle globaalisti rekisteröityjä tavaramerkkejä. © 2021. Mölnlycke Health Care Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. FIWC1242105


Mölnlycke[®]