

Tubifast®

WITH
2-WAY STRETCH®
TECHNOLOGY

Kevyt putkisidos sidosten paikallaan pitämiseen

Tubifast 2-Way Stretch on maailman ensimmäinen kevyt elastinen putkisidos, joka venyy sekä pituus- että leveyssuunnassa¹. Tämä ainutlaatuinen ominaisuus mahdollistaa potilaalle täydellisen liikkumisen vapauden ja viihtyvyyden.


Tubifast on ihanteellinen tuote sidosten paikallaan pitämiseen ja ihon suojaamiseen missä tahansa vartalon osassa. Sitä voidaan käyttää myös kipsinalussukkana. Tubifast 2-Way Stretch pitää sidoksen varmasti paikallaan ilman teippejä, neuloja tai muita kiinnittimiä. Lisäksi se on erittäin helppokäyttöinen ja rispaantuu vähemmän kuin perinteiset putkisidokset

Tubifast 2-Way Stretchin edut:

- Pitää sidoksen pysyvästi paikallaan ilman puristusta ja kompressiota.
- Putkimaisuutensa ansiosta Tubifastia on helppo käyttää eikä kiinnitykseen tarvita neuloja tai teippejä.
- Saatavana 5 eri värikoodattua leveyttä, jotka on suunniteltu istumaan mukavasti eri puolille kehoa.
- Kahdensuuntainen joustavuus takaa potilaalle täydellisen liikkuvuuden ja käyttömukavuuden.
- Vähemmän rispaantuva rakenne minimoi lankojen joutumista haavalle.
- Leikattava putkisidos mahdollistaa koko tuotteen kustannustehokkaan käytön.




Tubifast 2-Way Stretchin käyttö

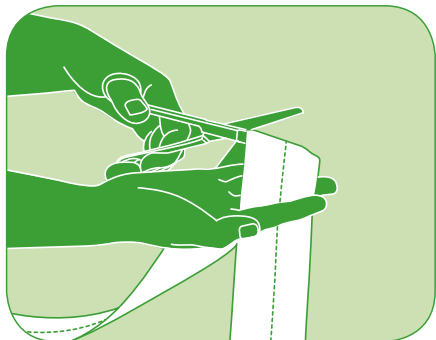

1. Valitse oikean levyinen putkisidos ja leikkaa se oikean pituiseksi.



2. Avaa sidos käsillä ja aseta se sidottavalle alueelle.

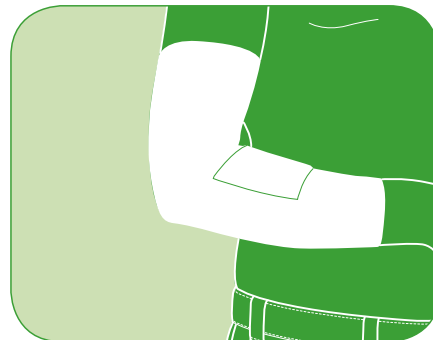

3. Aseta Tubifast sileästi sidoksen päälle. Vaikeammin sidottaville alueille on saatavilla yksityiskohtaiset käyttöohjeet.

Käyttöalueet

Tubifast 2-Way Stretchiä käytetään haavasidosten paikallaan pitämiseen ja ihon suojaamiseen vartalon eri osissa. Sitä voidaan käyttää myös kipsinalussukkana. Putkimaisuutensa ansiosta Tubifast 2-Way Stretch sopii erityisesti vaikeasti sidottaville alueille.

Valmistusmateriaali

Viskoosi, elastaani ja polyamidi

Pesuohje



Tubifast 2-Way Stretch - Kokovalikoima

Tuote	Leveys x pituus	Raajan ymp.mitta	Tuotenro.	Kpl/ osastopakkaus	Kpl/ kuljetuspakkaus
● PUNAINEN Pienet raajat	3,5 cm x 1m	8-15 cm	2480	12	36
	3,5 cm x 10m	8-15 cm	2434	1	20
● VIHREÄ Keskisuuret raajat	5 cm x 1m	10-25 cm	2481	12	36
	5 cm x 10m	10-25 cm	2436	1	24
● SININEN Suuret raajat	7,5 cm x 1m	20-45 cm	2482	12	36
	7,5 cm x 10m	20-45 cm	2438	1	30
● KELTAINEN Erittäin suuret raajat, pää, lasten vartalo	10,75 cm x 1m	35-65 cm	2483	12	36
	10,75 cm x 10m	35-65 cm	2440	1	12
● VIOLETTI Aikuinen vartalo	20 cm x 1m	60-130 cm	2479	12	48
	20 cm x 10m	60-130 cm	2444	1	15



Tubifast 2-Way Stretchissä tai sen pakkauksessa ei ole käytetty luonnonkumilateksia. Ei sisällä hartsia eikä PVC:tä.

Viitteet:

1 Julkaistu tutkimus osoittaa että Tubifast 2-Way Stretch ylittää vähimmäisvaatimukset vahvuudesta, joustavuudesta ja mukautuvuudesta. Physical testing of textiles, B. P. Saville, Woodhead Publishing, 1999.

www.molnlycke.fi

Mölnlycke Health Care Oy, pitäjänmäentie 14, 3krs. 00380 Helsinki. Puhelin: 0201 622 300
Mölnlycke Health Caren nimi ja logo ja Tubifast 2-Way Stretch ovat Mölnlycke Health Care Oy:n rekisteröimiä tavaramerkkejä.
©2013 Mölnlycke Health Care Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.


Mölnlycke®