

## Trousse de cou BARRIER®

- Absorption efficace pour une zone de travail maintenue au sec
- Passe-tubulaires intégrées pour faciliter l'utilisation des instruments
- Grand champ fendu pour couvrir entièrement le patient ainsi que la table



### **BARRIER crée l'effet ricochet à l'origine de meilleurs soins pour plus de patients**

Tous les produits BARRIER de Mölnlycke Health Care combinent parfaitement protection, fonctionnalité et confort. Nos solutions novatrices et produits-spécifiques sont complétées avec options de livraison et de logistique, ainsi qu'assistance et formation permanentes. Ces éléments combinés contribuent à créer un effet ricochet à l'origine de gains de temps, d'efforts et d'argent. Les ressources précieuses sont libérées avec, à la clé pour vous, de nouvelles efficacités et la possibilité d'offrir les meilleurs soins à plus de patients.

# Instructions



Centrez le champ fendu (corps), étiqueté 1, sur le torse du patient. Repérez le sens indiqué par le pictogramme.



Dépliez ce champ vers vous, puis dans la direction opposée et enfin vers la partie inférieure du corps. Retirez le feuillet de protection.



Fixez les bords adhésifs au cou du patient.



Positionnez le champ fendu (tête), étiqueté 2, sur la tête du patient. Repérez le sens indiqué par le pictogramme.



Dépliez ce champ vers vous, puis dans la direction opposée avant de couvrir la tête du patient.



Retirez le feuillet de protection.



Fixez les bords adhésifs.



Le drapage est terminé.

N° de référence	Description	Emballage
697250	<b>Trousse de cou</b> 1 housse de mayo 79x145 cm (65x85 cm absorbante) 4 cellduk 18x25 cm 2 OP-tape 9x49 cm 1 champ fendu (corps) 175x230 cm, fente 20x20 cm 1 champ fendu (tête) 260x150 cm, fente 20x65 cm 1 champ de table 150x190 cm (75x190 cm absorbant)	7/14

Tous les composants spécifiés sont disponibles pour les trousse ProcedurePak®.

## Champs opératoires BARRIER

- Matériaux 100% imperméable pour une sécurité optimale du patient
- Pliés de façon optimale et pour un emploi aseptique, utilisables par une seule personne en toute simplicité
- Conditionnement agréable d'emploi avec une boîte distributrice et un emballage pelable