

Champ de table BARRIER®


- Matériaux solides et durables qui garantissent résistance et fiabilité
- Imperméabilité et absorption efficace qui empêchent toute pénétration et contamination
- Pliage et rangement précis pour une manipulation facile et efficace
- Un large choix de tailles couvrant tous les modèles de tables



BARRIER crée l'effet ricochet à l'origine de meilleurs soins pour plus de patients

Tous les produits BARRIER de Mölnlycke Health Care combinent parfaitement protection, fonctionnalité et confort. L'offre de solutions novatrices et adaptées allie qualité supérieure, produits améliorant la sécurité, options de livraison et de logistique, ainsi qu'assistance et formation permanentes. Ces éléments combinés contribuent à créer un effet ricochet à l'origine de gains de temps, d'efforts et d'argent. Les ressources précieuses sont libérées avec, à la clé pour vous, de nouvelles efficacités et la possibilité d'offrir les meilleurs soins à plus de patients.



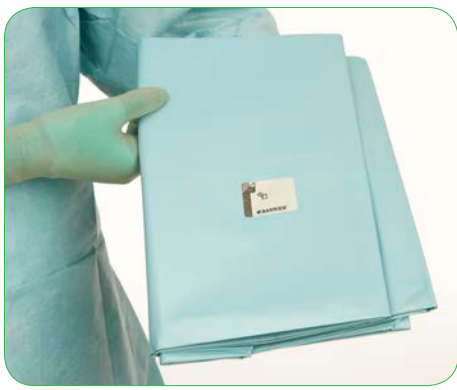

1 Tenez le champ de table dans la direction indiquée sur le pictogramme. L'étiquette est adhésive et collera à la table.



2 Retirez le feuillet de protection.




3 Placez le champ de table sur la table à instrument.



4 Dépliez vers les côtés.



5 Dépliez le champ de table vers vous.

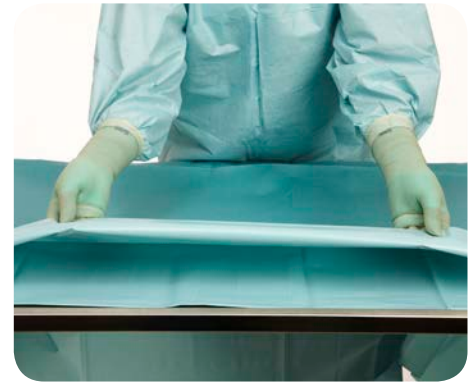

6 Dépliez le champ de table dans le sens opposé.

Code stérile	Composants du ProcedurePak®	Taille	Zone d'absorption	Emballage code stérile
80100	90100	100×150cm	75×150cm	40/80
80150	90150	150×150cm	75×150cm	30/60
80170	90170	150×170cm	75×170cm	27/54
80190	90190	150×190cm	75×190cm	22/44
80210	90210	150×210cm	75×210cm	21/42
80240	90240	150×240cm	75×240cm	20/40