



# Mölnlycke®

## Champ de nephroscopie BARRIER®

- Poche de recueil intégrée pour une gestion efficace des fluides
- Adhésif élastique intégré pour une fixation sûre
- Matériel ultra-résistant dans la zone critique pour un usage des instruments efficace et sûr



### BARRIER crée l'effet ricochet à l'origine de meilleurs soins pour plus de patients

Tous les produits BARRIER de Mölnlycke Health Care combinent parfaitement protection, fonctionnalité et confort. Nos solutions novatrices et produits-spécifiques sont complétées avec options de livraison et de logistique, ainsi qu'assistance et formation permanentes. Ces éléments combinés contribuent à créer un effet ricochet à l'origine de gains de temps, d'efforts et d'argent. Les ressources précieuses sont libérées avec, à la clé pour vous, de nouvelles efficacités et la possibilité d'offrir les meilleurs soins à plus de patients.

## Instructions



1  
Repérez le sens indiqué par le pictogramme.  
Retirez le feuillet de protection.



2  
Positionnez le champ au niveau du rein.



3  
Dépliez d'abord le champ vers vous, puis dans la direction opposée...



4  
...et ensuite vers les pieds du patient.



5  
Dépliez le champ vers la tête du patient et couvrez l'arceau d'anesthésie.



6  
Dépliez la poche de recueil.

N° de référence	Description	Emballage
65810	<b>Champ de nephroscopie</b> 175x300 cm avec poche de recueil, ouverture d'incision 5 cm, emballé	7/14

Ce champ est aussi disponible pour les troussees ProcedurePak®.

## Champs opératoires BARRIER

- Matériaux 100% imperméables pour une sécurité optimale du patient
- Pliés de façon optimale et pour un emploi aseptique, utilisables par une seule personne en toute simplicité