


Mepore®

Pansement chirurgical auto-adhésif

Mepore® est un pansement auto-adhésif perméable à l'air pour les plaies chirurgicales, sèches à moyennement exsudatives. L'adhésif polyacrylate aqueux, sans solvant, à haute tolérance cutanée, assure une fixation efficace et douce.

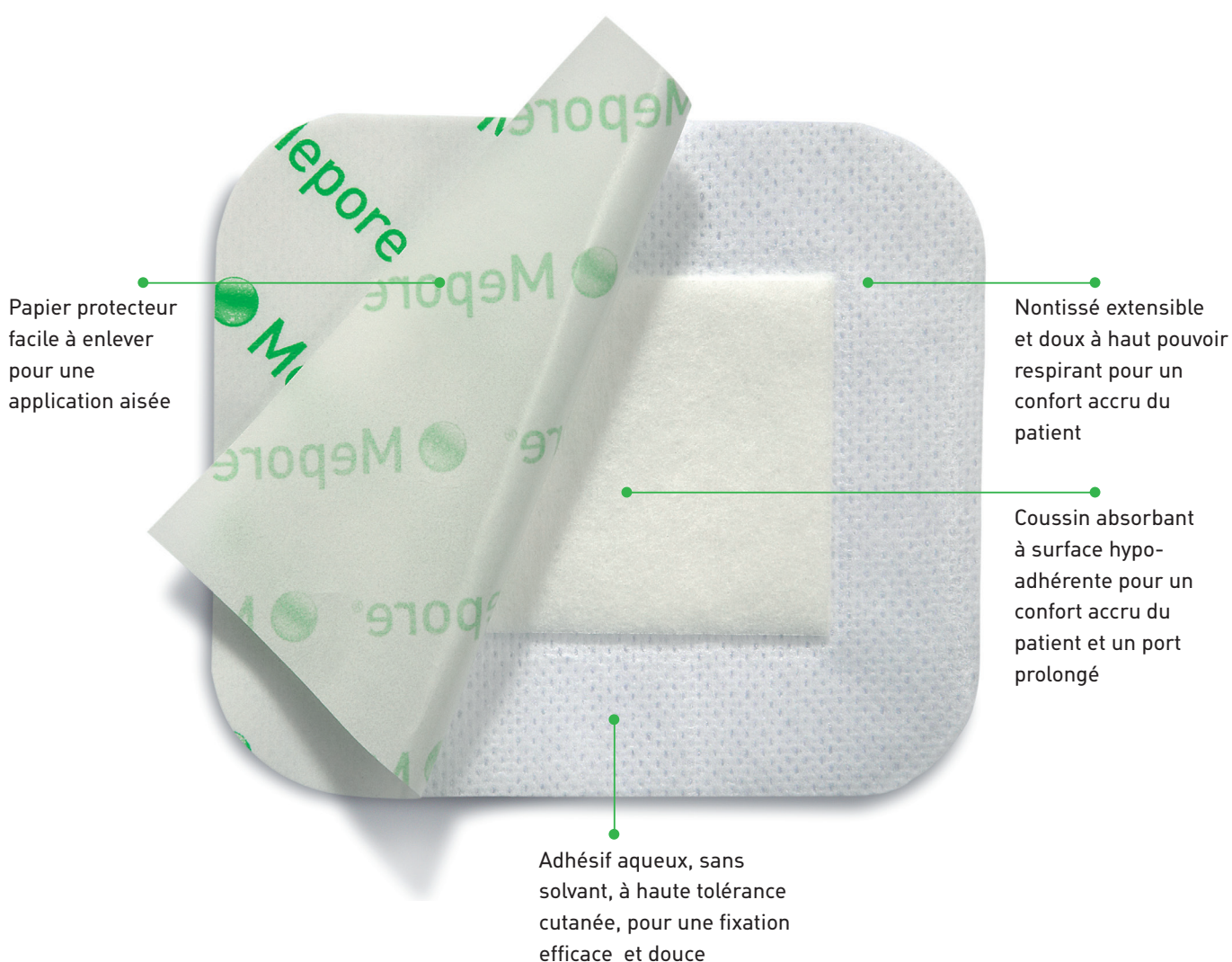

Mode d'emploi



Retirez le pansement de son emballage.



Retirez le feuillet de protection afin d'exposer la surface adhésive.



Appliquez sur la peau, dans la position anatomique. Ôtez lentement le feuillet de protection. Lissez bien le bord adhésif pour assurer une adhérence parfaite. Ne tirez pas sur le pansement lors de l'application.

Mode d'action de Mepore®

La structure poreuse du tissu non-tissé garantit la perméabilité à l'air et la vapeur. Le tissu est extensible, s'adapte bien aux contours du corps et permet au patient de bouger. Le tissu est non-absorbant et fait office de barrière contre l'écoulement du sang et des liquides. L'adhésif polyacrylate a été conçu pour respecter la peau, tout en garantissant une fixation efficace. Le coussin peut absorber des quantités modérées d'exsudats et la surface hypo-adhérente diminue le risque d'adhérence à la plaie.

Le feuillet garantit une application simple et stérile.

Avantages de Mepore®

- Adhésif aqueux à haute tolérance cutanée
- La surface de contact hypo-adhérente minimise le risque d'adhérence à la plaie
- Le film protecteur facile à enlever permet une application aseptique aisée
- Tissu perméable à l'air qui empêche la macération et accroît le confort du patient
- Angles arrondis pour une fixation efficace (toutes dimensions jusqu'à 9 x 15 cm)



Domaines d'utilisation

- plaies sèches ou moyennement exsudatives
- coupûres et écorchures

Fréquence des changements

La fréquence des changements du pansement dépend de l'évolution de la plaie. Pour enlever le pansement, décollez un bord et tirez lentement.

Précautions

Il convient de veiller à ce que Mepore® soit appliqué en position anatomique, sans exercer de tension sur la peau afin d'éviter tout cisaillement. Cet aspect revêt une grande importance en cas d'application au niveau des articulations.

Gamme Mepore® (stérile et non-stérile)

Dimensions	Code CNK	N° d'art.	Conditionnement	Emb.de transport
6 x 7 cm	1599-646	670800	60 x 1 pièce	480 pièces
6 x 7 cm	0615-351	670870	10 x 1 pièce	140 pièces
9 x 10 cm	1599-653	670900	50 x 1 pièce	400 pièces
9 x 10 cm	0190-942	670970	5 x 1 pièce	100 pièces
9 x 15 cm	1599-661	671000	50 x 1 pièce	400 pièces
9 x 15 cm	0190-959	671070	5 x 1 pièce	70 pièces
9 x 20 cm	1599-679	671100	30 x 1 pièce	180 pièces
9 x 25 cm	1599-687	671200	30 x 1 pièce	180 pièces
9 x 30 cm	1599-810	671300	30 x 1 pièce	270 pièces
9 x 35 cm	1599-844	671400	30 x 1 pièce	180 pièces

Gamme Mepore® sur rouleau (non-stérile)

2 m x 7 cm	0615-005	332080	1 pièce	21 pièces
------------	----------	--------	---------	-----------