

Mepore® Film Roll

Pansement film non-stérile sur rouleau, respirant, transparent et auto-adhésif

Mepore® Film Roll est un pansement film non-stérile sur rouleau, respirant, transparent et auto-adhésif, idéale pour la fixation de pansements, tubulures et canules.

Mepore® Film Roll peut être utilisé pour prévenir l'altération cutanée, pour la protection des peaux fragiles contre l'exsudat et la contamination bactérienne et virale de l'extérieur.



Technique d'application



1. Découpez le film à la longueur souhaitée (vous pouvez maintenir le rouleau dans l'emballage).



2. Enlevez le feuillet de protection avec le chiffre "1".



3. Appliquez Mepore® Film Roll sans l'étirer, de préférence en laissant une partie du feuillet de protection, qui pourra être déroulé en cours d'application. Appliquez un léger frottement sur le film pour garantir une bonne adhérence.



4. Enlevez le feuillet de protection transparent au dessus du film en détachant l'ailette verte avec le chiffre "2".



5. Pour finir, détachez les ailettes blanches afin que les contours du pansement se conforment bien à la peau et que le pansement soit résistant au frottement des draps, vêtements, etc.

Technique de retrait



Détachez un coin du pansement et tirez latéralement. Le film s'étire de telle manière et se détache partiellement de la peau. Répétez ce mouvement jusqu'à ce que le film se détache.

Avantages de Mepore® Film Roll

- Film transparent hautement respirant permettant l'échange d'exsudats et minimisant ainsi le risque de macération
- Fixation sûre pour un confort optimal du patient
- Film transparent permet l'inspection régulière et la détection d'éventuelles complications
- Film antiviral et antibactérien pour éviter le risque de contamination de l'extérieur
- Résiste à la douche pour plus de confort pour le patient
- Film mince et souple qui se conforme aux contours du corps
- Indication de taille sur le feuillet de protection pour mesurer et couper à votre guise
- Le pansement film est enroulé sur un support en plastique pratique assurant de bonnes conditions de stockage et d'utilisation

Précautions

Mepore® Film Roll ne peut pas être utilisé sur des patients sensibles aux adhésifs acryliques.



Références

N° d'art.	code CNK	Dimensions	Pièces/ boîte	Pièces/ TRP
276105	2743-193	5 cm x 10 m	1	24
276110	2743-201	10 cm x 10 m	1	12
276115	2743-219	15 cm x 10 m	1	8

Mölnlycke Health Care SA
Berchemstationstraat 72 b2, B-2600 Berchem
Téléphone: +32(0)3 286 89 50
www.molnlycke.com



Mölnlycke Health Care et Mepore® Film Roll sont des marques et des logos déposés au niveau mondial par la société Mölnlycke Health Care AB.