

Mepitac[®]

Ruban de fixation siliconé

Tissu maille


- Souple
- Flexible
- Facile à couper

Film de polyuréthane imper-respirant

- Imperméable à l'eau

Technologie de silicone molle micro-adhérente Safetac[®]

- Respecte la peau
- Adhère délicatement à la peau
- S'enlève sans trauma ni douleur
- Aucun résidu

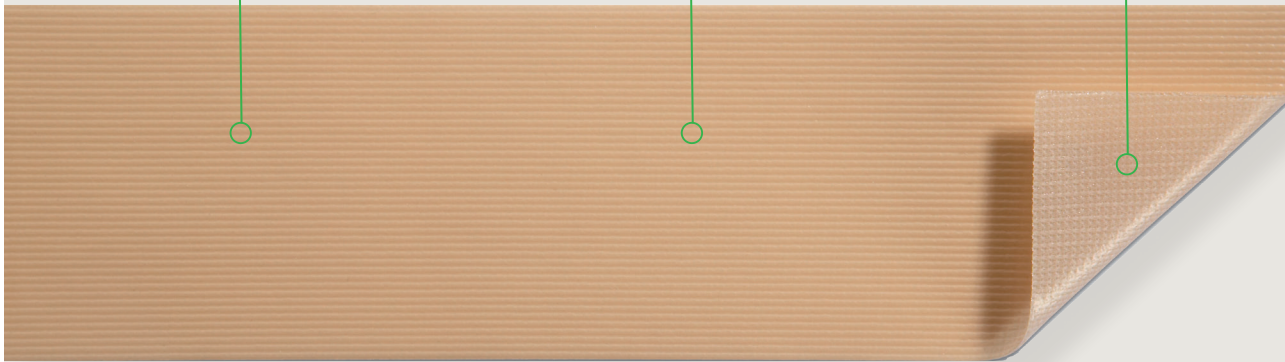

Safetac[®]
TECHNOLOGIE

- S'enlève sans trauma ni douleur
- Idéal pour les peaux fragiles ou sensibles
- Épouse bien les formes du corps
- Peut rester en place pendant plusieurs jours : économique et propice à la cicatrisation

Choix éprouvé pour un meilleur résultat

Safetac*, lancé par Mölnlycke, dépasse les attentes. Reconnus pour aider à optimiser la guérison des plaies, voire même prévenir les blessures, les pansements avec Safetac représentent le choix sûr pour les patients et la norme supérieure en soins des plaies.

En fait, de nombreuses données confirment les avantages cliniques et économiques des pansements avec Safetac, y compris Mepilex[®], Mepitel[®], Mepiform[®] et Mepitac[®]. À ce jour, ces pansements ont aidé des millions de patients partout dans le monde¹⁻³.


*Une technologie propriétaire unique exclusif à Mölnlycke Health Care

Safetac[®]
TECHNOLOGIE


Mepitac[®]


Mölnlycke[®]


Application de Mepitac®

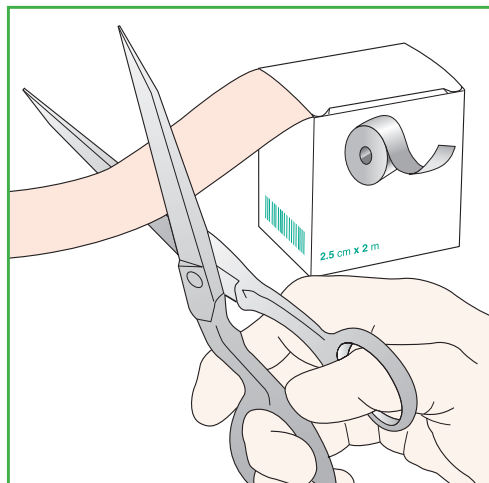

1. La peau doit être propre et sèche. Éliminer toute trace de préparation topique. Couper la longueur requise.

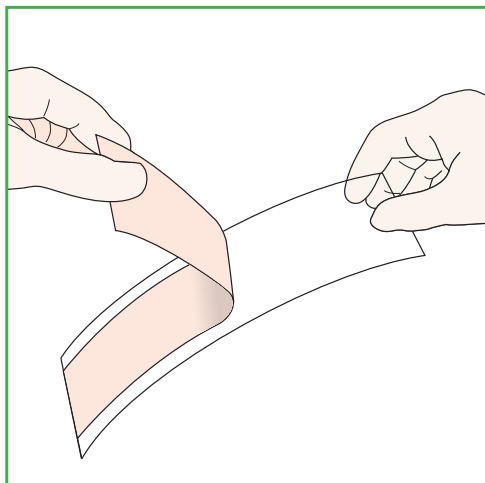

2. Retirer la pellicule anti-adhérente.

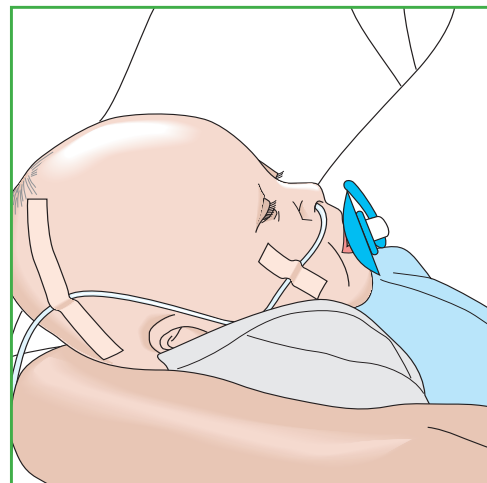

3. Poser Mepitac® sans étirer. On peut soulever et replacer Mepitac® pour l'examen ou le repositionnement du pansement.

Mode d'action de Mepitac®

Mepitac® est un ruban très souple, facile à poser et à enlever. La couche Safetac® procure une fixation solide tout en minimisant le trauma et la douleur quand on enlève le ruban. On peut repositionner Mepitac® au besoin. Mepitac® ne laisse aucun résidu et n'irrite pas la peau.

Mepitac® est le ruban de fixation idéal pour les peaux fragiles ou sensibles, les allergies et les troubles cutanés comme l'eczéma ou autres dermatites. Il convient aux cas où il faut retirer le ruban fréquemment sur la même région (p.ex. : nouveau-nés, blessures, stomies et dialyse).

Avantages de Mepitac®

- S'enlève sans endommager la peau
- Épouse bien les formes du corps
- Aucun résidu
- Imperméable et imper-respirant
- Peut demeurer en place pendant plusieurs jours: économique et propice à la cicatrisation

Sélection Mepitac®

No d'article	Format (pansement)	Pièces/boîte	Pièces/caisse
298300	2cm x 3m	1	12
298400	4cm x 1.5m	1	12

Indications

Mepitac® sert à fixer les drains, tubes, sondes, électrodes, canules i.v. et pansements. Mepitac® s'utilise aussi pour protéger la peau sous les dispositifs comme les tubes et canules.

Précautions

Mepitac® est contre-indiqué pour la fixation des cathéters et canules artériels ou les appareils de maintien de la vie.

N.B.

L'adhérence de Mepitac® diminue au contact de l'humidité (incubateur, diaphorèse).

