

Åpningsguide for Biogel® hanskeforpakning

'Liggende teknikk'

Det er ulike teknikker for åpning av hanskepakke. Teknikken varierer av flere grunner:

- utformingen av hanskepakken
- det forskjellige materialet i inner- og ytterforpakningen
- teknikken for å ta på hanskene (åpen metode, lukket metode med mansjett i hånden eller med synlig mansjett¹).

Sikre ytterforpakningens kanter slik at de ikke rører noen del av innerforpakningen og at innerforpakningen ikke er nær forseglingen på ytterforpakningens innerkanter. Dette er for å sikre og opprettholde steriliteten til innerforpakningen.

Åpning av hanskeforpakningen (utført av en usteril sykepleier)



1. Ta tak i pakken på den øvre kortsiden. Inspiser og rist hanskepakken lett for å påse at innerpakken er plassert i midten av ytterpakken. Dette gjøres for å hindre at innerpakken faller ut på den forseglede kanten når ytterpakken åpnes.



2. Dra endene på kortsiden fra hverandre. Start med øvre hjørne lengst fra deg. Fortsett med andre øvre hjørne nærmest deg.



3. Ta et godt grep med begge hender på hver side av forpakningen slik at langsiden av pakken kan dras fra hverandre.



4. Legg enten hanskepakken ned på et bord for å åpne den liggende eller åpne den i luften som vist på bilde nr tre.



5. Ta tak i innerpakken i forpakningen, med både hanske nr en og hanske nr 2, i nedre ender. Dette gjøres for å sikre at fingrene ikke blir kontaminert ettersom sterilitetsmarginen er relativt kort i forpakningens øvre ende.



6. Separer de to pakkene og legg dem ned med litt avstand fra hverandre på et rent og tørt underlag. Påse at forpakningens nedre ende stikker ut ca 5 cm fra bordet slik at du får tak i innerpakken og kan pakke ut uten å kontaminere de desinfiserte hendene.



7. Åpne pakken med innerhanskene. Vær nøye med at desinfiserte hender ikke kontamineres. Ta på hanskene som anbefalt¹.

Referanse: 1 Folin A. Donning indicator double Gloving system. Safe Hands 1/2010. Mölnlycke Health Care AB.

For mer informasjon se www.molnlycke.no

Mölnlycke Health Care, Postboks 6229 Etterstad, 0603 Oslo, Norge. Tlf 22 70 63 70. info.no@molnlycke.com
Mölnlycke Health Care og Biogel navn og logo er registrerte varemerker globalt til Mölnlycke Health Care Gruppen. ©2019 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheter forbeholdt. NOSU0631905


Mölnlycke®