

Påkledningsveiledning for Biogel® Indicator® Systeme

'ASSISTERT metode'

Ta på den sterile frakken og åpne ytter -og inneremballasjen som anbefalt¹



1. Plasser fingrene på hver hånd under den utvendige mansjetten (ca.10 cm fra kanten på hanskemansjetten) på den fargede innerhansken. Hansens håndflate må vendes mot personen uten hånd med hanske, rett mot personsens tommel. Bruk fingrene til å strekke mansjetten for å åpne hansken. Personen uten hanske putter deretter hånden i hansken ved hjelp av et fast nedadgående trykk.



2. Gjenta for den andre hånden. Personen, som får på hansker, kan hjelpe til med påkledning ved å ta tak i hanske-mansjetten.



3. Ved påkledning av stråfarget ytterhanske kan personen, som får på hansker, hjelpe til med påkledningen ved å dra ut mansjetten for å åpne hansken.



4. Pass på at ytterhansken trekkes godt over innerhansken (ca. 2,5 cm) for å unngå at den ruller/sklir ned.



5. Gjenta for den andre hånden og trykk kantene av hanskens mansjetter godt ned mot frakken for at antiskli-kanten i hansken sitter fast på frakken.



6. Når hanskepåtagningen og evt. justeringen er avsluttet, skal du strekke armene for å sikre deg at hanskene sitter riktig.

Bytting av kontaminert/punkttert hanske under operasjon.



7. Dersom en punksjon oppstår i nærvær av væske blir den synlig ved at det dannes en mørk flekk på punksjonsstedet i ytterhansken.



8. Ta av ytterhansken ved å dra mansjetten over håndflaten slik at hansken har innsiden ut. Kast den kontaminerte/punktterte hansken.



9. Sjekk innerhansken for punksjon. Dersom punkttert, fjern og erstatt hansken etter lokale anbefalinger eller rengjør og tørk sterilt.

Åpne en ny hanskepakke med de korrekte Biogel ytterhanskene for å sikre at Biogel Indicator systemet fungerer på tiltenkt måte. Ta på deg ytterhansken slik at mansjetten på ytterhansken er trukket godt over mansjetten til innerhansken (ca. 2,5 cm) for å unngå at hansken ruller eller sklir ned.

Besøk vår hjemmeside for videoveiledning til påtagning av frakk og operasjonshansker.

Referanser: 1 Folin A.Utpakning av Indicator-dobbelthanskesystem. En Sikker Hånd 2/2009. Mölnlycke Health Care AB.

Les mer på www.molnlycke.no

Mölnlycke Health Care, Postboks 6229 Etterstad, 0603 Oslo, Norge. Tlf 22 70 63 70. info.no@molnlycke.com
Mölnlycke Health Care og Biogel navn og logo er registrerte varemerker globalt til Mölnlycke Health Care Gruppen.
©2019 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheter forbeholdt. N05U0601905


Mölnlycke®