

Veiledning for bandasjeskift

Din behandler har valgt Mepilex® Border Flex bandasje til såret ditt.

Slik legger du på Mepilex® Border Flex:

1. Vask hendene med såpe og varmt vann i 20 sekunder.
2. Rens såret slik din behandler har vist deg, og tørk den omkringliggende huden grundig.
3. Sårputen skal overlape den tørre huden omkring såret med minst 1–2 cm.

4. Ta tak i den største delen av beskyttelsespapiret, og trekk det litt bakover.



5. Legg den heftende siden av bandasjen over såret.




6. Fjern mer av den største delen av beskyttelsespapiret, og glatt ut mot kantene.




7. Fjern det andre beskyttelsespapiret, og glatt ut mot alle kantene.




Bandasjen har et stiptet mønster slik at det er enklere å overvåke hvor mye væske den har absorbert.

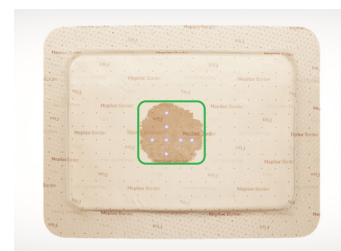

F.eks. 4x4 cm. Væsken vil gradvis vises på baksiden av bandasjen.

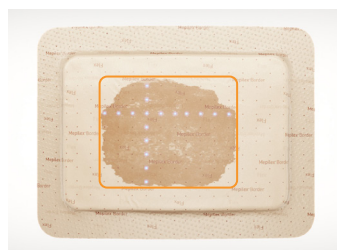

F.eks. 8x10 cm. Væsken kapsles inn og vil fordele seg utover i bandasjen uten kontakt med såret.

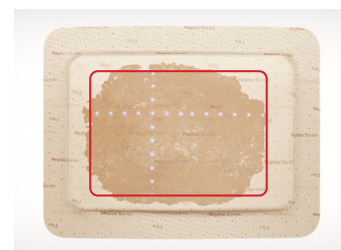

Vurder å skifte bandasjen når sårvesken nærmer seg kantene av bandasjen.

Når skal bandasjen skiftes:

Din behandler anbefaler at du skifter bandasjen (fylles ut av helsepersonell):

Viktig å huske på:

- ✓ Misfarging på baksiden av bandasjen er helt normalt
- ✓ Bandasjen kan ligge på i inntil 7 dager, avhengig av tilstanden til såret og den omkringliggende hud
- ✓ Bandasjen kan brukes i dusjen
- ✓ Mepilex Border Flex er kun til engangsbruk og skal ikke brukes flere ganger.

Mepilex Border Flex håndteres og legges på av helsepersonell. Dersom helsepersonell ikke er tilgjengelig, kan du eller en omsorgsperson måtte foreta bandasjeskiftet. Produsenten tar ikke noe ansvar når appliseringen av bandasjen foretas av slike personer. Hvis Mepilex Border Flex legges på av en person som ikke er helsepersonell, så skjer dette helt og holdent på brukerens egen risiko.

Les mer på www.molnlycke.no

Mölnlycke Health Care AS, Postboks 6229 Etterstad, 0603 Oslo. Besøksadresse: Brynsalléen 4, 0667 Oslo. Tlf. 22 70 63 70. Varemerkene, navnene og logoene Mölnlycke og Mepilex er registrert globalt av ett eller flere av selskapene i konsernet Mölnlycke Health Care. ©2020 Mölnlycke Health Care AB. Med enerett. NOWC1612007

Kontakt helsepersonell hvis du trenger hjelp eller veiledning.