

Mepilex[®] Border Ag

Den effektive, antimikrobielle, absorberende alt-i-ett skumbandasjen

Polyuretan baksidefilm

- Pustende
- Dusjtett
- Bakterie - og virusbarriere*


Safetac[®]-teknologi

- Minimerer skade og smerte, under og etter bandasjeskift¹
- Hefter til tørr hud, men ikke til det fuktige såret³
- Minimerer risikoen for maserasjon ved å danne en barriere rundt sårkantene⁴

Absorberende skumpute med flere lag

- Hydrofilt polyuretanskum med sølv, absorberer og sprer sårvesken samtidig som sølvet frigis
- Fiberlag for maksimal oppsamling

Antimikrobiell effekt innen 30 minutter og opptil 7 dager⁶

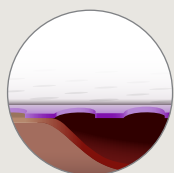

Safetac[®]-teknologi

Safetac er en patentert hefteteknologi som minimerer skade på såret og smerte for pasienten. Safetac-teknologi finnes kun i bandasjer fra Mölnlycke Health Care, inkludert Mepilex[®] - familien, Mepitel[®], Mepiform[®] og Mepitac[®].




* Mikroorganismer større enn 25 nm

- Minimerer skade og smerte ved bandasjeskift^{1,2,3}
- Hurtig og vedvarende antimikrobiell virkning⁵
- Effektiv væskehåndtering
- Sikker fiksering, men likevel atraumatisk ved fjerning


Mepilex[®] Border Ag


Mölnlycke[®]

Hvordan bruke Mepilex® Border Ag

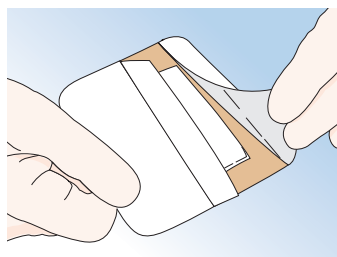

Rens sårområdet.
Fjern releasepapiret.

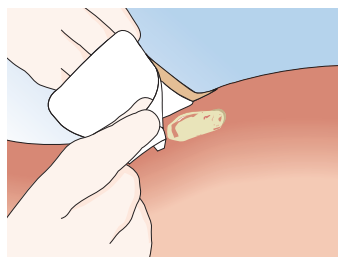

Appliser den heftende siden mot såret, ikke strekk.



Slik fungerer Mepilex Border Ag

Mepilex Border Ag er en antimikrobiell alt-i-ett skum-bandasje som effektivt absorberer og holder på sårvæsken og et fuktig sårmiljø. Safetac forsegler sårkantene og hindrer at sårveske lekker ut på omkringliggende hud. Dermed forhindres maserasjon. Safetac sikrer at bandasjen kan skiftes uten å skade den omkringliggende huden og uten å utsette pasienten for mer smerte.

Mepilex Border Ag inaktiverer sårrelaterte patogener innen 30 minutter med vedvarende effekt opptil 7 dager. Ved å redusere antall mikroorganismer kan Mepilex Border Ag også redusere odør.

Fordeler med Mepilex Border Ag

- Minimerer skade og smerte ved bandasjeskift
- Selvheftende – ikke behov for fiksering
- Dusjtett
- Kan brukes under kompresjon
- Komfortabel i bruk
- Kan ligge på såret i opptil syv dager avhengig av sårets tilstand
- Kan løftes og justeres uten å miste den heftende egenskapen
- Liten risiko for hudirritasjon og allergi

Referanser: 1. White R., A Multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK 2008; Vol 4, N o 1. 2. Dykes PJ et al. Effects of adhesive dressings on the stratum corneum of the skin. J Wound Care 2001; 10(2):7-10. 3. Dykes PJ. The effect of adhesive dressing edges on cutaneous irritancy and skin barrier function. J Wound Care 2007, 16(3):97-100. 4. Meaume S et al. A study to compare a new self adherent soft silicone dressing with a self adherent polymer Management, 2003. 5. External lab report: N AMSA 09C 29253 01/09C 29253 02. 6. Taherinejad and Hamberg. Antimicrobial effect of silver-containing foam dressing on a broad range of common wound pathogens. Poster publication, WUWHS 2008.

Bruksområder

Mepilex Border Ag egner seg til en rekke medium til svært væskende sår som for eksempel: legg- og fotsår, trykksår, maligne sår, delhudsbrannskade, traumatiske og kirurgiske sår der et fuktig sårmiljø, væskehåndtering, enkel fiksering og en antimikrobiell effekt er ønsket. For detaljert informasjon se pakningsvedlegget.



Mepilex Border Ag er pakket i sterile enhetspakninger

Art.nr.	Str. i cm	Antall i eske	Antall i kartong
395200	7,5 x 7,5	5	70
395300	10 x 10	5	50
395400	15 x 15	5	50
395600	15 x 20	5	45
395800	10 x 20	5	35
395700	10 x 25	5	35
395900	10 x 30	5	25
Mepilex Border Sacrum Ag			
382000	18 x 18	5	40
382400	23 x 23	5	25

For mer informasjon, se www.molnlycke.no

Mölnlycke Health Care, Postboks 6229, Etterstad, 0603 Oslo. Telefon: 22 70 63 70
The Mölnlycke Health Care name and logo, Safetac and Mepilex Border Ag are registered trademarks of Mölnlycke Health Care AB.NOWC0592303


Mölnlycke®