

## BARRIER® Cardiovasculaire Set

- Volledige ondoordringbaarheid
- Vasculair broeklaken met geïntegreerde genitale afdekking
- Thoraxlaken met geïntegreerde incisiefolie, transparante vochttopvang- / instrumentenzakken en extra absorptievermogen rond de incisiezone
- Breder anesthesiescherm met geïntegreerde kleefstroken voor een gemakkelijke fixatie
- Absorberende onderlaag voor het comfort van de patiënt





01 Indien gewenst, kunt u eerst een instrumentenveld onder de benen van de patiënt aanbrengen. Plaats het vasculair broeklaken onder de benen van de patiënt. Vouw het laken open en dek de patiënt af.



02 Bevestig de geïntegreerde genitale afdekking.



03 Trek de voetovertrekken over de voeten van de patiënt.



04 Het zelfklevend afdekdoek, 75x75 cm, kan als extra bescherming voor de halszone worden gebruikt. Verwijder het release papier van de plakstrook van het cardiovasculair laken.



05 Plaats het laken in het midden van de borst van de patiënt. Vouw de zijkanten van het laken open.



06 Vouw ALLEEN de eerste vouw van het onderste gedeelte van het thoraxlaken open. Vouw het bovenste gedeelte van het laken open over het anesthesieframe. De fixatiestrips kunnen aan de anesthesiezijde vastgemaakt worden.



07 Nadat het vene greffe chirurgisch verwijderd werd, vouwt u de rest van het thoraxlaken open.



08 Wanneer de afzonderlijke slangenhouders en de defibrillatorzak op het laken aangebracht zijn, is de afdekking compleet.

Cardiovasculairset / artikelnummer 694640	Afmetingen (cm)
1 versterkte mayo overzettafelsloop	79 x 145
6 handdoekjes	19 x 25
1 instrumentenveld	150 x 190
1 defibrillatorzak	33 x 38
2 slangenhouders	2,5 x 30
3 op-tape	9 x 49
2 voetovertrekken (groen)	
2 voetovertrekken (doorzichtig)	
2 zelfklevende afdekdoeken	75 x 75
1 vasculair splitlaken (split: 20x102 cm)	200 x 260
1 thoraxlaken (incisiefolie: 32x40 cm)	200/300 x 330
1 instrumentenveld	150 x 240

Verpakking: 3/6

