

BARRIER® versterkt instrumentenveld


- Sterke en duurzame materialen
- Ondoordringbaarheid en doeltreffende absorptie voorkomen doorslag en contaminatie
- Zelfklevende etiketten* voor een snelle, gemakkelijke en veilige fixatie
- Nauwkeurig gevouwen en verpakt voor eenvoudig en doeltreffend gebruik
- Ruime keuze van maten biedt oplossingen voor alle tafels



BARRIER creëert een cumulatief effect dat resulteert in behandeling van meer patiënten door efficiëntere zorg

Alle BARRIER producten van Mölnlycke Health Care zijn ontworpen om de ideale combinatie van bescherming, functionaliteit en comfort te verschaffen. Het assortiment van innovatieve, doelgerichte oplossingen biedt kwaliteitsproducten die de veiligheid verhogen, voordelen op het gebied van levering en logistiek, en permanente ondersteuning en training. Samen brengen die elementen een cumulatief effect teweeg, met besparingen van tijd, inspanning en kosten. Hierdoor komen waardevolle middelen vrij en kan efficiënter worden gewerkt, zodat u meer patiënten kunt behandelen door efficiëntere zorg.



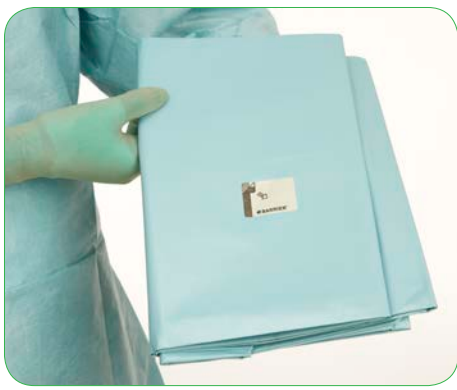

1 Hou het instrumentenveld in de richting die is aangegeven door het pictogram. Het zelfklevend etiket kan het laken aan de tafel bevestigen.



2 Verwijder de beschermstrook van het etiket.




3 Leg het instrumentenveld op de instrumententafel.



4 Vouw het open naar de zijkanten.



5 Vouw het instrumentenveld open in uw richting.

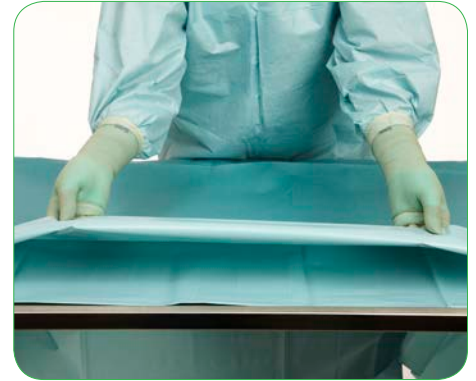

6 Vouw het open in de tegengestelde richting.

Artikelnummer	ProcedurePak [®] componenten	Maat	Absorptiezone	Verpakking
85195 ingepakt	95190	150×190cm	75×190cm	15/30
85215 ingepakt	95210	150×210cm	75×210cm	14/28
85245 ingepakt	95240	150×240cm	75×240cm	14/28
89215 ingepakt	99210	190×210cm	90×210cm	11/22
89285 ingepakt	99280	190×280cm	90×280cm	10/20
85190	95150	150×190cm	75×190cm	15/30
89210	99210	190×210cm	90×210cm	12/24

* Alleen bij steriele, per stuk verpakte of volledig gevouwen instrumentenvelden in sets en trays.