



# Mölnlycke®

Universeel set – BARRIER® Flex

Hals afdek materiaal

- Flexibele plakstroken die zich aanpassen aan alle contouren van het lichaam
- Rekbare plakstroken behouden een stevige adhesie wanneer het lichaam verplaatst of gedraaid wordt
- De kleefstof zorgt voor een veilige en stevige adhesie, zelfs na contact met vocht
- Dankzij drie release papers aan de rand van het laken heeft men de keuze om het afdeklaken over de volledige of gedeeltelijke lengte aan te brengen
- Doeltreffende absorptie houdt het werkveld droog
- Enkel beschikbaar bij Mölnlycke Health Care



### Het hoeft niet sneller, wel slimmer

Alle BARRIER® producten van Mölnlycke Health Care zijn ontworpen om een optimale combinatie van bescherming, functionaliteit en comfort te verschaffen. Het assortiment van innovatieve, doelgerichte oplossingen biedt kwaliteitsproducten die de veiligheid verhogen. Ons deskundig team biedt u daarnaast ondersteuning op gebied van levering en logistiek en staat u bij met permanente educatie en training. Samen zorgt dit voor besparing van tijd, inspanning en kosten. Zo kunt u zich richten op wat echt belangrijk is, namelijk meer patiënten behandelen door efficiëntere zorg.



## Instructies



Verwijder het middelste deel van het release paper (nr. 1) van het zelfklevend afdekdoek. Als de plakstrook over de volledige lengte gebruikt moet worden, verwijder dan ook de twee andere delen van het release paper.



Kleef het zelfklevend afdekdoek langs de hals van de patiënt, te beginnen aan de borst. Om de andere kant af te dekken, begin bovenaan het hoofd. Volg de omtrek van het lichaam, hou het afdeklaken licht aangespannen.



Hou het zelfklevend afdeklaken (medium) met uw vingers in de plooi. Verwijder het middelste deel van het release paper.



Leg het gevouwen zelfklevend afdeklaken over de middellijn van de borst.



Verwijder de rest van het release paper en maak de randen vast. Vouw het afdeklaken open over het onderste deel van het lichaam.




Verwijder het middelste deel van het release paper. Leg het gevouwen zelfklevend afdeklaken (large) over de middellijn van de kin. Verwijder de rest van het release paper en maak de randen vast.



Vouw de rest van het zelfklevend afdeklaken open in de richting van het hoofd.

## 66010 Universeel Set - BARRIER Flex

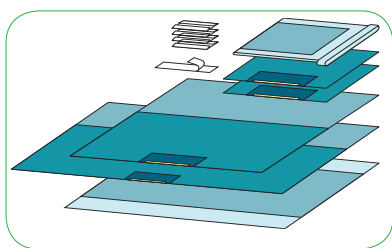

### Aantal Omschrijving

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Mayo overzettafelsloop 79x145cm, 65x85cm absorberend |
| 2 | Zelfklevende afdekdoeken 90x75cm                     |
| 4 | Handdoekjes 18x25cm                                  |
| 1 | OP-tape 9x49cm                                       |
| 1 | Zelfklevend afdeklaken 175x175cm                     |
| 1 | Zelfklevend afdeklaken 300x175cm                     |
| 1 | Instrumentenveld 150x190cm, 75x190cm absorberend     |

## BARRIER afdeklakens

- 100% ondoordringbaar voor optimale veiligheid van de patiënt
- Optimaal gevouwen voor steriel gebruik, eenvoudig aan te brengen door één persoon