


# Mepilex® Transfer

## WONDVOCHTDOORLATEND SCHUIMVERBAND

- Minimaliseert pijn en weefseltrauma
- Transfereert exsudaat naar een secundair verband bij zeer natte wonden
- Beschermt droge wonden of grote zones van fragiele huid
- Geschikt voor moeilijk te verbinden lichaamsdelen
- Vormt zich perfect naar de lichaamscontouren

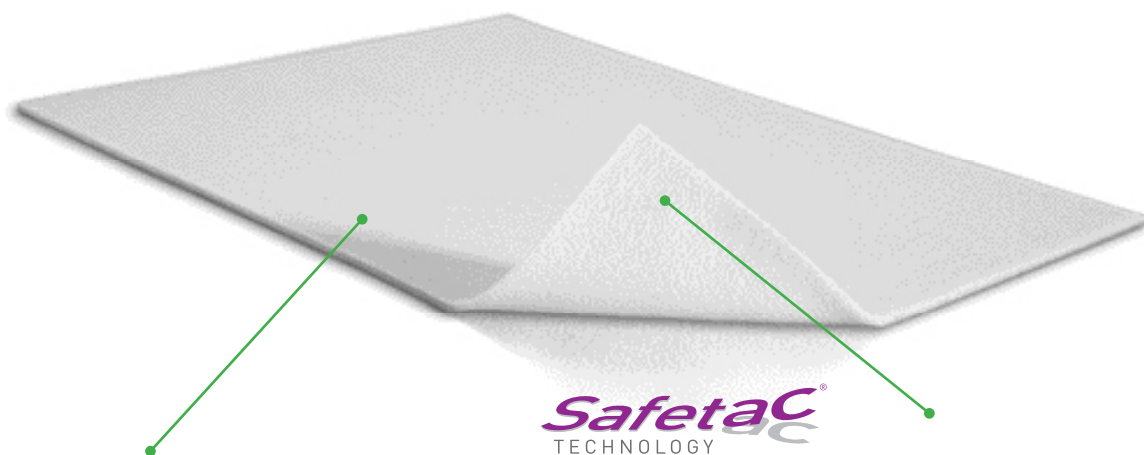

### Polyurethaan schuimlaag

- Transfereert exsudaat naar een secundair verband
- Vormt zich perfect naar de lichaamscontouren
- Bijzonder elastisch


### Safetac® laag

- Atraumatisch bij verbandwissels
- Kleeft niet in de wond
- Minder risico op maceratie


### Safetac® technologie

Safetac is een unieke en gepatenteerde adhesietechnologie die pijn voor de patiënt en trauma aan de wond minimaliseert. Safetac is uitsluitend beschikbaar bij wondverbanden van Mölnlycke Health care, waaronder Mepilex wondverbanden, Mepitel, Mepiform en Mepitac.

Surf voor meer informatie naar [www.safetac.com](http://www.safetac.com)

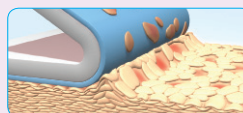


Traditionele kleeblagen hechten zich alleen aan de tophuidcellen. Daardoor kleeft het verband plaatselijk harder om ter plaatse te kunnen blijven.

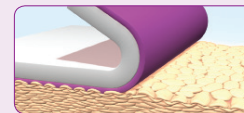


Safetac vormt zich naar de huidporiën en sluit daarbij de wondranden goed af. Het kleeft bovendien niet in een vochtig wondbed.


## Gebruiksaanwijzing

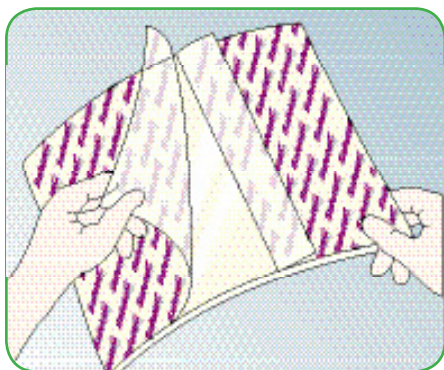

Reinig het wondgebied.  
Verwijder het schutblad.

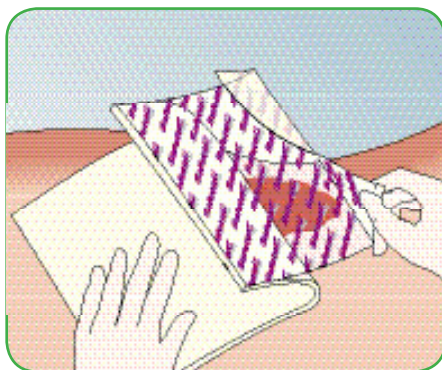

Zorg ervoor dat Mepilex® Transfer wordt  
aangebracht met een overlap van minimum  
5cm. Het verband niet uittrekken.

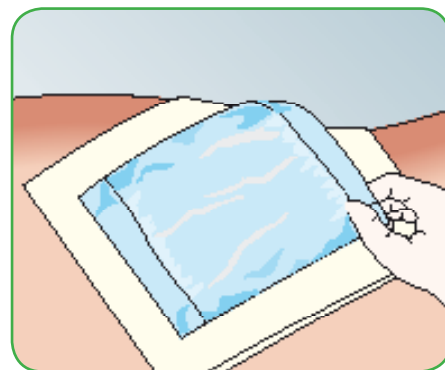

Gebruik bij natte wonden een geschikt  
secundair verband (bv. Mesorb®) en fixeer  
met Tubifast®, zwachtel, netverband...

## Hoe Mepilex Transfer werkt

Mepilex® Transfer is een dun schuimverband, bedekt met Safetac® technologie. Het vormt zich perfect naar de lichaamscontouren. Daarnaast verzekert het verband een direct contact met het wondbed en de omliggende huid, zelfs op oneffen delen van het lichaam. Bij natte wonden transfereert Mepilex® Transfer het wondvocht naar een secundair aan te brengen absorberend verband, bv. Mesorb®. Bovendien behoudt Mepilex® Transfer een vochtig wondmilieu.

## Voordelen

- Transfereert wondvocht weg van de wond
- Minimaliseert pijn en trauma bij verbandwissels
- Vormt zich goed naar lichaamscontouren
- Kan op maat worden geknipt
- Zorgt voor een minimum risico op maceratie
- Biedt een goed draagcomfort voor de patiënt
- Mag eventueel ter plaatse blijven tijdens radiotherapie in samenspraak met de radiotherapeut

## Indicaties

- Droge tot zeer natte wonden
- Oncologische wonden
- Blaarziekten zoals epidermolysis bullosa
- Grote dermatologische letsels of fragiele huid

## Voorzorgsmaatregelen

Bij klinische tekenen van infectie een adequate behandeling instellen



### Mepilex Transfer assortiment

Art. nr	Afm. (cm)	CNK-code	Stuks/RET	Stuks/TRP
294800	15x20	1747-401	5	8x5
294502	20x50	3003-332	4	6x4

Meer informatie op [www.molnlycke.be](http://www.molnlycke.be)

Mölnlycke Health Care NV, Berchemstadionstraat 72/2, 2600 Berchem, België. Tel +32 (0)3 286 89 50 - Fax +32 (0)3 286 89 52  
Mölnlycke Health Care, Mepilex® zijn wereldwijd geregistreerde handelsmerken en logo's van Mölnlycke Health Care.

© 2013 Mölnlycke Health Care AB. Alle rechten voorbehouden.